

 GCS Aubagne/ La Ciotat	PRE ANALYTIQUE Imprimé Dictionnaire des analyses Aubagne 1	PRA/A/IMP/4
		Version 4
		Page 1 sur 1

PENSER A APPUYER REGULIEREMENT SUR LA TOUCHE F5 POUR METTRE A JOUR LE DICTIONNAIRE

Historique

Version 6	Suppression analyse ACPN	Date de diffusion :30 novembre 2016
Version 4	Ajout analyses :Zika, Rapport créati/protéines, Pradaxa, Xarelto, Clairance CKD EPI, anti SLA, anti Sp100, anti GP210 Modifications : Insuline, Chlamydiae PCR, Mycoplasmes PCR, Prélèvements vaginaux, Tacrolimus	Date de diffusion : 23 aout 2016
Version 5	Modifications : 2,3 DPG, Ac anti-gliadine	Date de diffusion : 30 septembre 2016

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#)
[P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)

Liste des laboratoires correspondants

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
A1 (Vitamine A1) (RETINOL)	VITA	1T.Vert Hépariné Ou Marron/Gel	T° Ambiante A l'abri de la lumière		CERBA	Plasma ou sérum congelé à l'abri de la lumière
Alpha 2 macroglobuline	A2MAC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
AAG (Orosomucoide)	AAGC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti 21 hydroxylase	AC21H	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Ac anti acétycholine	AACET	Marron/Gel	T° Ambiante		IMMUNO CONCEPTION	Sérum
Ac anti acide glutamique decarboxylase (AC anti G.A.D).	ACGAD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti actine (Muscle lisse)	ACAC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Adénovirus	ADENS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti ADN Natif (Test de Farr)	FARR	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Amibe (Amibiase)	AMIB	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Anguillules (Anguillulose)	ANGU	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Ag nucléaires solubles ENA (Extract Nuclear Antigen) (SSA/SSB/Sm/RNP/Jo1/Sci70)	ECT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	2 ml de Sérum
Ac anti Arbovirus (Ac Anti Dengue, Chikungunya, West Nile...)	ACDEN	Marron/Gel	T° Ambiante	Fiche West Nile Toscana Fiche Dengue Chikungunya	IRBA-IMTSSA (LAVERAN)	Sérum
Ac anti Ascaris	ASCA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Aspergillose (Ac Anti Aspergillus)	ASPE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Aviaires	AVIA	Marron/Gel	T° Ambiante	Poumon d'éleveur d'oiseaux	CERBA	Sérum
Ac anti-Bartonella henselae (Maladie griffes du chat) serologie	GRCHA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti bêta 2 GP1	ACGP1	T.Marron/Gel	T° ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Bilharziose	BILH	T.Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti BK	ACBK	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Botulinique	ACBOT	3 T Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	7 ml Sérum
Ac anti Brucella (Wright+Rose bengale)	MALTC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
	ACCAM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum

Ac anti Campylobacter						
Ac anti Candida	CAND	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Cardioline	ACCAL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti cellules pariétales estomac (Ac anti Estomac)	ACEST	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti centromère	ACCEN	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Chlamydia Pneumoniae	CHLAM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Chlamydia Psittaci	ACPSI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Chlamydia Trachomatis	CHLAC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Collagène	ACCOL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Coqueluche	ACCOQ	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Coqueluche IgM	ACCOM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Coxiella burnetti (Ac anti Fièvre Q)	ACFQ	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Coxsackies (Entérovirus)	COXS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Cytoplasme Polynucléaires Neutrophiles	ANCA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Cytoplasme Polynucléaires Identification	ANCAP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Dengue (Ac anti Arbovirus)	ACDEN	Marron/Gel	T° ambiante	Fiche West Nile Toscana Fiche Dengue Chikungunya	IRBA-IMTSSA (LAVERAN)	Sérum
Ac anti Diphtérie	ACDIP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Douve	DISTO	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti ECT Ac anti Extraits cellules thymiques (SSA/SSB Sm/RNP/Jo/Scl70) Ac Anti E.N.A	ECT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti ENA (Ac anti Extractible Nuclear Antigen)	ECT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Endomysium	ACEND	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Epstein Barr Virus	EBV	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Ac anti Estomac (Ac Anti cellules pariétales)	ACEST	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Estradiol (Ac Anti Oestradiol)	ACE2	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Facteur intrinsèque	ACFI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Facteur VII	ACF7	Bleu/citrate	T° Ambiante		CERBA	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Ac anti Facteur VIII	ACF8	Bleu/citrate	T° Ambiante		CERBA	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Ac anti Facteur IX	ACF9	Bleu/citrate	T° Ambiante		CERBA	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Ac anti Fièvre Q (Ac anti Coxiella Burnetti)	ACFQ	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Fièvre Q IgM	ACFQM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Filaggrine (anti kératine)	ACKER	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Filaire (Filariose)	FIL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti- Francisella (tularémie)	ACTUL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
AC anti GAD / Ac anti acide glutamique decarboxylase	ACGAD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Giardia	ACGIA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti GM1	ACGM1	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Ac anti-gliadine IgA	GLIAA					Ne se fait plus. Saisir l'analyse, elle s'annule automatiquement
Ac anti-gliadine IgG	GLIAG					Ne se fait plus. Saisir l'analyse, elle s'annule automatiquement
Ac anti β2GP1	ACGP1	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti GP 210	GP210	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Grippe A	ACGRA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Grippe B	ACGRB	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Haemophilus influenzae	ACHI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
	ACBC	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum

Ac anti HBc (Hépatite B)						
Ac anti HBc IgM (Hépatite B)	HBCMC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti HBe (Hépatite B)	ACBEC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti HBs (Hépatite B)	ACBS	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Ac anti Hélicobacter Pylori	ACHEL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Héparine voir Ac anti- PF4	ACPF4	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Ac anti Hépatite A IgG	HAVT	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Ac anti Hépatite A IgM	HAM	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Ac anti Hépatite D (DELTA)	ACHD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Herpes 6	HER6	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Herpes I + II	HERP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Histones	ACHIS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Histoplasme	HISTO	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Hu (Ac anti Neurone)	ACHUC	Marron/Gel LCR	T° Ambiante		CERBA	Sérum LCR
Ac anti Hyaluronidase	HYALP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum Congelé
Ac anti Hydatidose	HYDA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti IA2	ACIA2	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Ilots de Langerhans	ACLAN	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Insuline	ACINS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
	ACKER	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	1 ml sérum minimum

Ac anti Kératine (Ac Filaggrine)						
Ac anti L.K.M (Ac Anti microsomes FOIE et REIN) (Ac anti réticulum endoplasmique)	ACRTE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Legionnelle	ACLE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Leishmanie	LEIS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Leptospire	ACLEP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Leucoplaquettaire	PNPL	2 T rouge sans gel	T° Ambiante		EFS	Non centrifugés
Ac anti-Listéria	ACLIS	Marron/Gel	T° Ambiante			Ne se fait plus. Saisir l'analyse, elle s'annule automatiquement
Ac anti Lyme	ACLYM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Lyme Western Blot (confirmation)	ACLYF	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti M.A.G	ACMAG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Ac anti Membrane basale Dermo épidermique	ACMBD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Membrane basale glomerulaire (Ac anti REIN)	ACMB	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Microsomes foie et rein (Ac anti L.K.M) (Ac anti réticulum endoplasmique)	ACRTE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Mitochondrie	ACMI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Muscle lisse	ACMU	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Muscle strié	ACMUS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti-Mycoplasmes génitiaux	MYCG	Marron/Gel	T° Ambiante			Ne se fait plus. Saisir l'analyse, elle s'annule automatiquement
	MYCP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum

Ac anti Mycoplasma Pneumoniae IgG IgM						
Ac anti Myocarde	ACMYO	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Neurone Voir Ac anti Hu ou Ac anti Ri	ACHUC ACRI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Nucléaires	AAN	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Oestradiol (Ac anti estradiol)	ACE2	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Oreillons IgG	OREG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Oreillons IgM	OREM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti P24/HIV	AP24	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Centrifugé non ouvert
Ac anti Parvovirus B19	ACPA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	2 ml sérum minimum
Ac anti Pasteurella	ACPAS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Peau	ACPEA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Peptide Citrulline,CCP-2	ACPCI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Phosphatidyl éthanol amine	ACPAM	Marron/Gel	T° Ambiante		IMMUNO CONCEPTION	
Ac anti Phospholipide	ACPHO	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac Anti PF4 (Héparine) (TIH)*	ACPF4	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Ac anti Plaquettaire	APLAQ	Rouge sans gel	T° Ambiante	Cette demande s'accompagne toujours d'un coombs direct plaquettaire : voir coombs	EFS	Non Centrifugé
Ac anti Plasmodium (paludisme)	PALUD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Pneumocystis carinii	ACPNE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Poliovirus	ACPOL	Marron Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Poumon fermier	POUMF	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Précipitine Anti Actinomycete Thermophile	ACACT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
	ACPRO	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum

Ac anti Progesterone						
Ac anti Rabique	ACRA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Récepteur acétylcholine	RACT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Ac anti Récepteur de la TSH	RTSH	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Récepteur de la TSH avec recherche Ac Bloquants	RTSH2	Marron/Gel	T° Ambiante		Faculté LAENNEC LYON	Sérum
Ac anti Rein (Ac Anti membrane basale glomérulaire)	ACMB	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti-Réticuline	ACRET	Marron/Gel	T° Ambiante			Ne se fait plus. Saisir l'analyse, elle s'annule automatiquement
Ac anti Réticulum endoplasmique (Ac anti LKM) (Ac anti Microsome Foie Rein)	ACRTE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti RI (Ac anti Neurone)	ACRI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Ribosome	ACRIB	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Rickettsies	ACRIC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Rougeole G+M	ROUG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Rougeole IgM	ROUM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Rubéole IgG	RUB	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Ac anti Saccharomyces cerevisiae	ACSAC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Ac anti-Shigella	ACSHI	Marron/Gel	T° Ambiante			Ne se fait plus. Saisir l'analyse, elle s'annule automatiquement
Ac anti SLA	ACSLA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Sp 100	SP100	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Spermatozoïdes	ACSPE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Ac anti-Streptocoque (ASLO-ASDOR)	ASDLC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Ac anti Surrénales	ACSUR	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti T3	ACT3	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti T4 (Ac anti Thyroxine)	ACT4	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Taenia	TAEN	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti TCT (Ac Anti Thyrocalcitonine)	ACTCT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Tétanique	ACTET	2 T Marron Gel	T° Ambiante		CERBA	2 ml sérum minimum
Ac anti Thyroglobuline	ACTHG	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
Ac anti Thyroïdiens (Ac anti Thyroglobuline + Ac anti Thyropéroxydase T.P.O)	ACTHG+ACTPO	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
Ac anti Thyropéroxydase (Ac anti T.P.O)	ACTPO	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
Ac anti Thyroxine (Ac anti T4)	ACT4	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Toxocara canis	TCAN	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Transglutaminase	ACTGM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Trichine	TRIC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Trypanosome (maladie de CHAGAS)	TRYP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	2 ml de Sérum
Ac anti Tularemie : Ac anti Francisella tularensis	ACTUL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Varicelle IgG+IgM	ACVA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti V.R.S (Ac Anti Virus Respiratoire Syncytial)	VRS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Yersinia	YERS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ac anti Yo (Ac anti Neurone)	ACYOC	Marron/Gel LCR	T° Ambiante		CERBA	Sérum LCR
Ac anti ZIKA	ACZIK	Marron/Gel	T° Ambiante	A effectuer 5 jours après le début des signes cliniques	CERBA	Sérum
ACE (Ag carcino Embryonnaire)	ACE	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Acétone sang	ACET	Violet edta	T° Ambiante		CERBA	Sang total T° ambiante
Acétone urine*	ACEU	Urine/Echantillon	T° Ambiante		AUBAGNE	Urines Fraîchement émises
Acide acétyl salicylique (aspirine)	SAL	Vert/Héparine	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma Transport<3h
Acides aminés sanguin quantification	AAS	Vert/Héparine	T° Ambiante	Descendre rapidement au labo (<30min)	CERBA	Plasma congelé Centrifuger rapidement (<30 min)
Acides aminés urinaires quantification	AAU1	Urines de la nuit	T° Ambiante	Dosage préférable au dosage sanguin. Ne pas demander sang+urine	CERBA	5 ml urines congelées
Acides biliaires totaux	ACBIL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Acide citrique urinaire	ACITR	Urines de 24 H	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urines congelées
Acide delta amino lévulinique	ADAMI	10 ml urines	A l'abri de la lumière		CERBA	A conserver à + 4 °

Acides gras totaux	ACGT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum Congelé
Acides gras longues chaînes W3 W6	ACLCH	Marron/Gel	T° Ambiante	3ml serum	CERBA	Transmis hospital St Antoine
Acides gras non estérifiés = Ac gras libres (NEFA)	NEFA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Acide gras à très longues chaînes	AGLC	Marron/Gel	T° Ambiante	Congelé (2 ml)	CERBA	Congelé
Acide homovanilique	AHMO	Urines de 24 h Pour adulte Ech pour < 15ans		Recueil des urines dans flacon contenant 1 % HCL	CERBA	10 ml Urines PH 2
Acide hyaluronique	HYALS	Marron/gel	T° Ambiante	1 ml	CERBA	Congelé
Acide hydroxyindol acetique	5HIA	Urines 24 h/ Ac chlorhydrique	T° Ambiante	Recueil des urines dans flacon contenant HCL	CERBA	10 ml urines PH2
Acide lactique (lactates)*	LACT	Gris Fluorure Na	<u>A amener au labo dans les 15 minutes</u> Dans Glace	Apporter immédiatement au labo	AUBAGNE	
Acides organiques urinaires	ACORU	Urines de la nuit	Congelées		CERBA	20 ml urines congelées
Acide pyruvique	PYRU	Vert/héparine lithium			CERBA	2 ml de surageant de défécation/ (sang total + Acide perchlorique 6 % VOL/VOL)
Acide urique sang (Uricémie)*	URI	Jaune/Gel	T° Ambiante	Signaler traitement Uricolytique	AUBAGNE	
Acide urique urines*	URIU	Urine de 24 h	T° Ambiante	Garder au frais ; Noter diurèse	AUBAGNE	
	DEPA	Marron /Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum

Acide valproïque (Dépakine)*						
Acide vanilmandélique AVM	AVM	Urines des 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse /Recueil des urines dans bocal contenant – Acide chlorhydrique HCl	CERBA	10 ml minimum PH 2
ACTH (+cycles)	ACTH	Rose/Aprotinine	Chaîne du froid	Dans la glace	CERBA	Centrifuger à 4 C congeler 1 ml de plasma immédiatement
Activité Hémolytique totale CH 50	CH50	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Activité proagrégante plaquettaire (TIH)	APROP	Bleu Citate	T° Ambiante	Ne se fait pas en première intention dans les TIH		Saisir l'analyse elle s'annule automatiquement avec un commentaire
	RENI	2 T violet / EDTA	Chaîne du froid	Centrifugation immédiate pour congélation Prélèvement couché après 2/3 heures décubitus Prélèvement debout après 1 heure déambulation	CERBA	4 ml de plasma congelé

Activité rénine (Angiotensine) Addis (Compte d')	ADD	Urines Voir protocole spécifique	T° Ambiante		AUBAGNE	Protocole de recueil spécifique
Adénovirus (sérologie)	ADENS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Adénovirus (recherche directe)*	ADENO	Selles	<u>A amener au labo dans les 6 heures</u> T° Ambiante		AUBAGNE	
ADH (Vasopressine)	ADH	3 T violet / EDTA	Chaîne du froid	Dans la glace	CERBA	Centrifuger à 4° Congeler le plasma immédiatement
Adhésivité plaquettaire	ADHPL	Tube spécial	T° Ambiante	Sur RDV téléphoner au laboratoire avant 9 h	MORANGE TIMONE	Non centrifugé – Avant 10H chez JUHAN
Ag carcino embryonnaire (ACE)	ACE	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
Ag Hbe (Hépatite B)	AGBEC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Ag HBs (Hépatite B) (* Si AEV ou si statut sérologique non connu lors accouchement)	AGBS	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Hépatite B (Ag HBs neutralisation)	AGBSN	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Antigènes Helicobacter pylori	HPAG	Selles	T° Ambiante		AUBAGNE	
Ag spécifique prostatique PSA	PSA	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	Sérum à congeler le jour même.
Agrégabilité plaquettaire (exploration des fonctions plaquettaires)	AGGPL	4 T bleu/Citrate 1 T violet/EDTA	T° Ambiante	Sur RDV Téléphoner au labo	HEMATO TIMONE	Non centrifugé avant 10 h
Agrégation plaquettaire / Activité proagréante plaquettaire (TIH)	APROP	Bleu Citate	T° Ambiante	Ne se fait pas en première intention dans les TIH		Saisir l'analyse elle s'annule automatiquement avec un commentaire
Agglutinines froides	AGFDC	2 Rouges sans gel + 1 EDTA	Sérum immédiatement à 37°C	Prélevé par le labo	CERBA	Mettre immédiatement à l'étuve à 37° Laisser coaguler et décanter à 37° minimum 2 heures Centrifuger sérum+envoi tube edta sang total
Agglutinines irrégulières AIR ou RAI	AIR	2 T violet/EDTA	T° Ambiante		EFS	
Albumine sang*	ALB	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Albumine urine*	ALBU	Urines de 24H	T° Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	Urine
Alcoolémie*	ALC	Jaune/Gel	Transport rapide T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Aldolase	ALDOL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Aldostérone sang	ALDOS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
	ALDOU	Urines 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse – recueil dans bocal contenant acide chlorhydrique	CERBA	10 ml urines minimum PH 2

Aldostérone urine						
Alpha 1 antitrypsine	AATC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Alpha 2 macroglobuline	A2MAC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Alpha foeto protéine	AFP	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
Alpha hydroxyprogestérone	17OHP	Marron/gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Alpha tocophérol (vitamine E)	VITE	Vert/héparine lithium	A l'abri de la lumière		CERBA	Plasma congelé
Amibiase (Ac Anti Amibe)>	AMIB	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Amikacine*	AMID	Vert/hépariné	T° Ambiante	Taux résiduel prélever avant l'injection suivante Pic : prélever 1h après 1 injection IM Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma
Amiodarone (Cordarone)	AMIOD	Rouge/sec	T° Ambiante	Prélever avant la prise Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Amiriptiline (LAROXYL)	AMITR	Rouge/sec	T° Ambiante	2 semaines après le début du traitement	PHARMACO TIMONE	Sérum
Ammoniémié*	AMON	Vert/hépariné	Dans la Glace	Apporter immédiatement au labo	AUBAGNE	
AMP cyclique sang	AMPC	Violet / EDTA	Chaine du froid	Dans la glace	CERBA	Centrifuger à 4° 1 ml plasma congelé immédiatement
AMP cyclique urinaire	AMPCU	Urines de 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	5 ml urines congelées
Amylase Liquide de drainage*	AMYLP		T° Ambiante		AUBAGNE	
Amylase Liquide gastrique*	AMYLG		T° Ambiante		AUBAGNE	
Amylase sang*	AMY	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Amylase urine*	AMYU	Echantillon ou urines de 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	
Ancotil (5 FC) (Flucytosine)	ANCO	Rouge/sans gel	T° Ambiante	T30min en IV T2h en voie orale Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
11βOH androstènedione	11BAN	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Androstenediol glucuronide sérique = Androstènedione	ANDRA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	2,5 ml sérum minimum
Androstènediol urinaire	ANDRU	Urines des 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urines minimum
	ANDET	Urine des 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	20 ml urines

Androstérone + Ethiocholanone (*17 céstostéroïdes)						
Angiotensine (Activité rénine)	RENI	2 T Violet/EDTA	Chaîne du froid	Dans la glace	CERBA	4 ml de plasma congelé
Antibiogramme (souche transmise par labo ext)	ATBLE	Souche bacterienne			AUBAGNE	
Anti coagulants circulants	ACC	Bleu/citrate	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	CERBA	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Anti thrombine III (AT III) (*si urgent)	AT3	Bleu/Citrate	<u>A amener au labo dans les 4 heures</u> T° Ambiante	Tube correctement rempli	AUBAGNE	
Antigène Cryptocoque	AGCRY	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Antigène Aspergillus	AGASP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Antigénémie CMV leucocytaire	CMVAG	Vert	T° Ambiante	Transport dans les 24 heures	CERBA	Non centrifugé
Antigène Hépatite D (Delta)	AGHD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Antigène P24 HIV	P24	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Centrifugé non ouvert
Antigène urinaire Legionelle *	LEGIO	Urines	T° Ambiante		AUBAGNE	10 ml urines
Antigène urinaire pneumocoque*	PNEU	Urines	T° Ambiante		AUBAGNE	10 ml urines
Antigène LCR pneumocoque*	PNEUL	LCR	T° Ambiante		AUBAGNE	
Anti streptodornase (ASD)+ antistreptolysine O (ASLO)	ASDLC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Apolipoprotéine A	APOAC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Apolipoprotéine B	APOBC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Apolipoprotéine C3	APOC3	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Arsenic	ARSEN	Vert/Héparine lithium	T° Ambiante		CERBA	Non Centrifugé
Arylsulfatase A	ARYLA	ACD 5 ml	T° Ambiante	Sang total	CERBA	Sang total T° Ambiante
ASDOR + ASLO (Antistreptodornase + Antistreptolysine)	ASDLC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Aspect du Serum	ASPS	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Aspirine (Acide acétyl salicylique)	ASPI	Rouge/sec	T° Ambiante	1 à 3 h après la prise	PHARMACO TIMONE	Sérum
Atazanavir (Reyataz)	ATAZA	1T vert hépariné	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma hépariné
AVM (acide vanilmandélique)	AVM	Urines des 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse /Recueil des urines dans bocal contenant – Acide chlorhydrique HCl	CERBA	10 ml minimum PH 2
Axepim (Céfépim)	AXEPI	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition de Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	OBSERVATIONS LABORATOIRE
B1 (Vitamine B1)	VITB1	1T.Violet/EDTA	T°Ambiante à l'abri de la lumière	Sang Total	CERBA	Sang Total congelé à l'abri de la lumière
B 9 (Vitamine B9)	B9	Marron/Gel	A centrifuger rapidement T°Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
B 12 (Vitamine B 12)	B 12	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
B19 Ac anti Parvovirus	ACPA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Barbituriques urine*	BARBU	Urine/Echantillon	T°Ambiante		AUBAGNE	
Bartonella henselae (Maladie griffes du chat) serologie	GRCHA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Bartonella henselae (Maladie griffes du chat) PCR sur biopsie, sang total, pus...	BARPC	Violet/EDTA si sang total	T°Ambiante		CERBA	Sang total
BCR/ABL Réarrangement-qualitatif (Diagnostic LMC)	BCRFI	2 violets/EDTA	T°Ambiante	Méthode FISH	FACULTE HOPITAL NORD	Sang total T°Ambiante
BCR/ABL Transcrit – quantitatif (Maladie résiduelle – Suivi de traitement)	BCRPC	2 violets/EDTA	T°Ambiante	Méthode RTPCR Sur demande spécifique	FACULTE HOPITAL NORD	Sang total T°Ambiante
Bence Jones (protéine Bence Jones)	IEPU	Urines des 24 h sans ac borique	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	20 ml Faire dosage PROUR
Benzodiazépines urine*	BENZU	Urine/échantillon	T°Ambiante		AUBAGNE	
Béta 2 Glycoprotéine I (Ac anti)	B2GPI	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Béta 2 Microglobuline	B2MI	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Béta 2 Microglobuline Urine	B2MIU	Urines des 24 h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	5 ml minimum
Béta carotène	BCARO	Vert/Hépariné Lithium	A l'abri de la lumière		CERBA	1 ml plasma congelé à l'abri de la lumière
Béta HCG quantitatif sang *	HCGD	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Bicarbonates urinaire*	HCO3U	Echantillon ou Urines des 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	Centrifugation
Bilharziose sérologie	BILH	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Bilirubine totale et conjuguée*	BIL	Jaune/ Gel	Transport rapide T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
BK (culture)	BK	Crachats ou urines ou autres	T°Ambiante	Indiquer l'origine du prélèvement. Pour les urines, les prélèvements doivent être faits 3 jours de suite sur la totalité des urines du matin, si possible avec restriction hydrique	LA CIOTAT	
BK Hémo-culture ou moelle	HEMBK	Vert Héparine	T°Ambiante		CERBA	sang
BK Antibiogramme	BKATB	Culture BK	T°Ambiante		LA CIOTAT	
BK Autres	BKIDA	Culture BK	T°Ambiante		LA CIOTAT	
BK Identification	BKIDT	Culture BK	T°Ambiante		LA CIOTAT	
BK recherche par PCR	BKPCR	Crachats ou urines ou autres	T°Ambiante	Indiquer l'origine du prélèvement	CERBA	
BNP*	BNP	Violet/EDTA	T°Ambiante		AUBAGNE	Plasma
Bromazépam (Lexomyl)	BROMA	Rouge/sec	T°Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Bromure Sang = Bromurémie	BROMS	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	4 ml Sérum
Bromure Urine = Bromurie	BROMU	Urines des 24 h	T°Ambiante	Noter Diurèse	CERBA	10 ml minimum
Brucellose=Malte (Wright + Rose bengale)	MALTC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Brucellose I.F.	BRUIF	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
BW =Syphilis(VDRL + TPHA)	BW	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
BW IgM	FTAM	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
BW confirmation Western-Blot IgG ou IgM	WBSY	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
BW LCR (syphilis) VDRL+TPHA	BWL	LCR/Echantillon	T°Ambiante		AUBAGNE	LCR

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition de transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	OBSERVATIONS LABORATOIRE
CA 15.3	CA153	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
CA 19. 9	C199	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
CA 19.5	CA195	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
CA 125	CA125	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
CA 242	CA242	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
CA 50	CA50	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
CA 549	CA549	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum

CA 72.4	CA724	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Caféinémie	CAFE	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Calcitonine (TCT)	TCT	Marron/Gel	Chaîne du froid	Dans la glace	CERBA	Sérum congelé 1 ml minimum
Calcium Ionisé	CAIO	1 T vert hépariné	T° Ambiante	Rapidement au laboratoire	AUBAGNE	
Calcium Sang*	CA	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Calcium Urine*	CAU	Echantillon ou urines des 24 h	T° Ambiante	Noter la diurèse	AUBAGNE	Ajuster PH
Calcul urinaire	CALC				CERBA	Préciser l'origine
Calprotectine fécale	CALPR	Selles	T° Ambiante		CERBA	Selles
Cannabis Urine*	CAN	Urine/ Echantillon	T° Ambiante		AUBAGNE	
Capacité Fixation Transferrine*	CTFCS	Marron/gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Carbamates Sang	CARBA	Rouge/sec	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Carbamates Urinaires ou Gastriques*	CARBU	Pot Stérile	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Pot Stérile
Carbamazépine (Tegretol)*	TEGRE	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Carboxy-déficient Transferrine	CDT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Carboxyhémoglobine (oxyde de carbone-carboxyhémoglobine)*	CARB	1 T vert hépariné	T° Ambiante		AUBAGNE	Sang total
Caryotype Constitutionnel (sang) Attention pas X fragile	CARYC	2 TVert /Hépariné Lithium	T° Ambiante	pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête Joindre une fiche de renseignements cliniques et consentement	CERBA	Sang Total non centrifugé
Caryotype recherche Syndrome X fragile	XFRAG	3x5ml violet EDTA	T° Ambiante	pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête Joindre une fiche de renseignements cliniques et consentement	CERBA	Sang total
Caryotype Constitutionnel sur liquide amniotique	CARYA	Pot Stérile	T° Ambiante	pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête Joindre une fiche de renseignements cliniques et consentement	CERBA	
Caryotype Hémopathie (sang ou moelle) CERBA	CARC	Milieux spéciaux Cerba	T° Ambiante	Remplir fiche de renseignements Moelle : pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	
Caryotype Hémopathie (sang ou moelle) TIMONE	CARYM	MO :Seringue héparinée 3cc ou sang : 2TVerts	T° Ambiante	Sur demande spécifique médecin hématologue. Remplir fiche de renseignements	CYTO GENETIQUE TIMONE	Sang : non centrifugé Moelle prélevée sur seringue héparinée
Catécholamines Plasmatiques	CATE	2 T vert/ Hépariné Lithium	T° ambiante		CERBA	5 ml de plasma minimum congelé
Catécholamines urinaires	CATEU	Echantillon ou urines des 24h	Urines dans flacon contenant 1%HCL	Noter la diurèse	CERBA	10 ml
CBU (cytobactériologie des urines)	CBU	Urines sur conservateur	<u>Si pas sur conservateur à amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Urines prélevées stérilement Préciser heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Céfépim (Axezim)	AXEPI	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Ceftazidime (Fortum)	CEFTA	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Céruleoplasmine	CERUL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
17 Cétostéroïdes	17CET	Urines des 24h	T° Ambiante	Noter la diurèse	CERBA	20 ml
CH 50 ou complément total (Activité Hémolytique Totale)	CH50	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
	TRYPA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	2 ml de sérum

| | | | | | | |

CHAGAS (Maladie de) ou Ac anti Trypanosome						
Chimiotactisme des polynucléaires	CHIPN	1T Rouge Sec 2 T Vert/hépariné	T° Ambiante	Prendre rendez-vous	HEMATO TIMONE	Non centrifugé
Chikungunya (voir Ac anti- arbovirus)	ACDEN	Marron/Gel	T° Ambiante	Fiche de renseignements	IRBA-IMTSSA (LAVERAN)	Sérum
Chlamydiae trachomatis Recherche (prélèvements vaginaux, urétraux, oculaires, urines)	CTPCR	Ecouvillons spéciaux dans milieu transport (bouchon BLEU CLAIR) Autre privé sur pot stérile	T° Ambiante	Préciser la nature du prélèvement sur le bon	AUBAGNE	Ecouvillons spéciaux dans milieu transport (bouchon BLEU CLAIR) Urines 10ml
Chlamydiae trachomatis PCR (liquide ponction)	CTPCR	Liquide ponction	T° Ambiante		AUBAGNE	1 ml de liquide
Chlamydia Pneumonia (sérologie)	CHLAM	Marron/gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Chlamydia Psittaci (sérologie)	ACPSI	Marron/gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Chlamydia Trachomatis (sérologie)	CHLAC	Marron/gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Chloroquine	CHLOR	Vert/hépariné	T° Ambiante		PHARMACO TIMONE	
Cholestérol*	CHO	Jaune/Gel	T° Ambiante	Patient à jeun strict	AUBAGNE	Sérum
Cholestérol HDL (HDL)*	HDL	Jaune/Gel	T° Ambiante	Patient à jeun strict Résultats abaissés en cas d'administration de Métamizole	AUBAGNE	Sérum
Cholinestérase érythrocytaire	CHOLG	Vert/Hépariné Lithium	T° Ambiante		CERBA	Sang total T° Ambiante
Cholinestérase sérique	CHOLS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Chromogranine A	CHROA	Marron/Gel		Serum congelé	CERBA	
Chromosome Philadelphie BCR/ABL Réarrangement (Diagnostic LMC)	BCRFI	2 violets/EDTA	T° Ambiante	Méthode FISH	FACULTE HOPITAL NORD	Sang total T° Ambiante
Chromosome Philadelphie BCR/ABL Transcrit (Maladie résiduelle – Suivi de traitement)	BCRPC	2 violets/EDTA	T° Ambiante	Méthode RTPCR	FACULTE HOPITAL NORD	Sang total T° Ambiante
Chromatographie sucres urinaires	CHSUC	Echantillon ou 24 h	T° Ambiante	Noter la diurèse Echantillon 50 ml minimum	CERBA	50 ml minimum
Chymotrypsine	CHYM	Selles de 24h			CERBA	
CLA 30 mixtes IgE	IGECM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
CLA 30 pneumallergènes IgE	IGECP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
CLA 30 trophallergènes IgE	IGECT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Clairance Créatinine Mesurée*	CLEA	Urines 24 h + Jaune/Gel	T° Ambiante	Noter la diurèse	AUBAGNE	Les urines doivent être accompagnées du prélèvement sanguin
Clairance créatinine Calculée * (formule Cockroft)	CREA	Jaune/Gel	T° Ambiante	Noter poids	AUBAGNE	Sérum
Clairance créatinine Calculée * (formule CKD EPI)	CKEPI	Jaune/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	
CLOBAZAM ou Norclobazam (Urbanyl)	CLOB	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Clomipramine (Anafranil)	CLOMI	Rouge/sec	T° Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Clonazepam (Rivotril)	CLONA	Rouge/sec	T° Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Clorzépatate (Tranxène)	CLORA	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Clostridium Difficile Recherche Toxines A et B*	CD	Selles pot stérile	T° Ambiante	Conserver au frais	AUBAGNE	Selles
Clozapine (Leponex)	CLOZA	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
	CMV	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum

CMV (CytomégaloVirus) sérologie						
CMV par PCR (biopsie ponction, sang LCR)	CMVPC	Sang : Violet/EDTA	T°Ambiante	Préciser la nature du prélèvement sur le bon	CERBA	T °Ambiante Sang total
CMV Antigène leucocytaire	CMVAG	Vert/Hépariné	T°Ambiante	Transport dans les 24h pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	Sang total
CMV Avidité des IGG	CMVAV	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
CMV sang (culture)	VIRE	Vert/Hepariné Lithium	T°Ambiante	Milieux de transport virus pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	5 ml
CMV culture cellulaire (urine sans conservateur, LBA, biopsie, ponction)	RCMV	Echantillon urine pot stérile sans conservateur	T°Ambiante	Milieux de transport virus	CERBA	
CO ₂ Total (réserve alcaline)*	CO ₂	Jaune/Gel	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Cocaïne Urine*	COCA	Urine/ Echantillon	T°Ambiante		AUBAGNE	
Coefficient saturation transferrine*	CTFCS	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Cofacteurs Facteurs II, V, VII, X*	COF	Bleu/Citrate	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T°Ambiante	Tube correctement rempli	AUBAGNE	Plasma
Complément C1 Estérase inhibiteur Activité	C1IAC	Bleu/Citrate	T°Ambiante	Tube correctement rempli	CERBA	Plasma congelé
Complément C1 Estérase inhibiteur Antigène	C1IAG	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Complément C1q ou Fraction C1	C1	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Complément C2 ou Fraction C2	C2	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Complément C3 Ou Fraction C3	C3C	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Complément C3 proactivateur (facteur B)	C3PA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Complément C4 ou Fraction C4	C4C	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Complément Total ou CH50	CH50	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Complexes Immuns Circulants C I C	CIC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Compte d'Addis	ADD	Urines Voir protocole spécifique	T°Ambiante		AUBAGNE	Protocole de recueil spécifique
Coombs Erythrocytaire Direct EFS	C1CTS	2 Violet/EDTA	T°Ambiante		EFS	
Coombs Erythrocytaire Indirect EFS	COMIC	2 Violet/EDTA	T°Ambiante		EFS	
COOMBS plaquettaire = COOMBS direct + indirect plaquettaire (test de DIXON)	CODPL+APLAQ	Violet/EDTA + Rouge Sec	T°Ambiante	coombs direct et indirect en même temps. pour 100 000 plaquettes 6 T Violets pour 50 000 plaquettes 10 T.Violets pour 10 000 plaquettes 15 T. Violets plus toujours un tube Rouge /Sec	EFS	Non centrifugés. Joindre le résultat de la numération
Coproculture	COPRO	selles	T°Ambiante	Préciser heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Coqueluche (sérologie)	ACCOQ	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Coqueluche par PCR	COQPC	Aspiration nasopharyngée (ou écouvillon)	T°Ambiante		POC TIMONE	
Cordarone (Amiodarone)	AMIOD	Rouge/sec	T°Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Corps Abestosiés	ABES	Tube fourni par labo LEPI (10 ml formol + 20 ml de lavage broncho-alvéolaire)	T°Ambiante	LEPI	LEPI	Si plusieurs prélèvements: 1 flacon/jour avec 1 fiche de renseignements fournie par LEPI
Corps Cétoniques Urinaires (dosage)	CCETO	Echantillon	Urines fraîches		BIOCH TIMONE	1 ml urines
Corps Cétoniques Urinaires* (dépistage sur bandelette)	ACEU	Urine/ Echantillon	Urines Fraîchement émises		AUBAGNE	
CORTISOL (+cycle)	CORT	Marron/gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	Si cycle congeler
Cortisol Binding Globulin	CBG	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Cortisol Libre Urinaire	CORTU	Urines des 24 h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urines
Cotinine Urinaire	COTIN	Echantillon	T°Ambiante		CERBA	10 ml urines
CPK créatinine phosphokinase*	CK	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
CPK Isoenzymes (Isoenzymes CPK)	CKMM	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
	ACCOM	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum

Coqueluche IgM	CREUR	Urines des 24h	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urines
----------------	-------	----------------	-------------	---------------	-------	--------------

| | | | | | | |

Créatine Urinaire*						
Créatinine Sang*	CRE	Jaune/Gel	T°Ambiante	Résultats abaissés en cas d'administration de N Acétylcystéine et de Métamizole	AUBAGNE	Sérum
Créatinine (Clairance Calculée formule Cockcroft) *	CREA	Jaune/Gel	T°Ambiante	Noter poids	AUBAGNE	Sérum
Créatinine Urines*	CREU	Echantillon ou urines des 24 h	T°Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	
Créatorrhée	CREAT	Selles des 24 h	T°Ambiante		CERBA	50 g
Creutzfeld Jacob Recherche protéine 14-3-3 sur LCR Recherche du gène PRNP (si demandé)	CJ	LCR (3-4 ml) Sang EDTA 10ml Tube sec 10 ml	5 ml LCR non hémolysé Tube sang non centrifugé	Rapide +4°C avec pack réfrigérant	BIOCHIMIE LARIBOISIÈRE	
Cross-Laps ou CTX urinaire	CROSC	Seconde urine du matin	T°Ambiante	Sans acide	CERBA	10 ml urine
Cross-Laps ou CTX sérique	CTXCC	Marron/Gel	T°Ambiante	Le matin à jeun strict	CERBA	Sérum congelé Centrifuger et congeler dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
CRP (protéine C réactive)*	CRP	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Cryofibrinogène	CFIB	2 Bleu/Citrate 1 Violet/EDTA	37°	Transport immédiat dans coton cardé	IMMUNO CONCEPTION	Prévoir Chauffeur Transport à 37°
Cryoglobuline (recherche ou typage)	CRYOT	2 T Rouge/Sec	Immédiatement à 37°C Prélèvement effectué par le labo	Prélèvement par le laboratoire à jeun strict	CERBA	1 ml de Sérum coagule centrifugé à 37°C
Cryptococcus neoformans (Ag circulant)	AGCRY	Marron gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Cryptosporidies	CRYPQ	Selles	T°Ambiante		CERBA	Selles fraîches
CTX sérique	CTXCC	Marron/Gel	T°Ambiante	Le matin à jeun strict	CERBA	Sérum congelé Centrifuger et congeler dans les 3 heures qui suivent le prélèvement
Culture Virale (Recherche non orientée)	CULVI	Milieu transport Virus	T°Ambiante		CERBA	T°Ambiante
Cupremie	CUS	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Cuprurie	CUPRU	Urines de 24 h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	20 ml urines + diurèse
	CYCLO	Violet/EDTA	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	T°Ambiante

Cyclosporine						
Cyfra 21-1	CYFRA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	
Cytobactériologie des urines (CBU)	CBU	Urines sur conservateur	T°Ambiante	Urines prélevées stérilement Préciser heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
	CMV	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum

CytomégaloVirus (CMV) sérologie						
CytomégaloVirus par PCR (biopsie ponction, sang LCR)	CMVPC	Sang : Violet/EDTA	T°Ambiante	Préciser la nature du prélèvement sur le bon	CERBA	T °Ambiante Sang total
CytomégaloVirus Antigène leucocytaire	CMVAG	Vert/Hépariné	T°Ambiante	Transport dans les 24h pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	Sang total
CytomégaloVirus Avidité des IGG	CMVAV	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
CytomégaloVirus sang (culture)	VIRE	Vert/Hepariné Lithium	T°Ambiante	Milieux de transport virus pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	5 ml
CytomégaloVirus culture cellulaire (urine sans conservateur, LBA, biopsie, ponction)	RCMV	Echantillon urine pot stérile sans conservateur	T°Ambiante	Milieux de transport virus	CERBA	

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
DAO (Diamine Oxydase)	DAO	Liq. amniotique	avant 9h	Liquide sur papier buvard	MEDECINE NUCLEAIRE TIMONE	Liquide amniotique (Timone 2 ^{ème} étage)
Ddimère*	DDIM	1T Bleu/Citraté	A amener au labo dans les 2 heures T°Ambiante	Tube complètement rempli	AUBAGNE	
Dégranulation basophiles (test de dégranulation des basophiles)	TDBH1	3T Violet/EDTA	T°Ambiante Prélever le jour de l'envoi pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête Préciser le nom de l'allergène		CERBA	Ne pas centrifuger Noter les allergies a tester ,pas de traitement antihistaminique, anxiolytique, corticoïdes les 15 jours avant examen
Déhydrostestosterone DHT DHT Déhydrostérone	DHT	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	2,5 ml Sérum
Delta 4 androstenedione	D4AND	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Densité urine	DENS	Echantillon ou urine de 24h	T°Ambiante		AUBAGNE	
Déoxypyridinolines urinaires (pyridinoline)	PYRI	Secondes urines du matin	T°Ambiante		CERBA	10 ml d'urines sans acide
Dépakine (Acide valproïque)*	DEPA	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Dérivés méthoxylés (urines)	METAN	urines de 24 h + 1ml HCl	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	15 ml urines
Dérivés méthoxylés plasmatiques	META	1 violet/EDTA	T°Ambiante	Plasma congelé	CERBA	Plasma congelé
Dermatophytes (recherche)	MYCOL	Prélèvement cutané ou autre échantillon urine	Si patient transportable, l'amener au labo. Sinon prendre contact avec un biologiste.		AUBAGNE	
11 Désocorticoïdes urinaires	11DCO	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	10 ml urine
11 Désocortisol sérique	11DES	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	2 ml sérum
11 Désocortisol urinaires	11DSU	urines de 24 h	T°Ambiante		CERBA	10 ml urine
21 Désocortisol sérique	21DES	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	2 ml sérum
DHA (dehydroepiandrosterone)	DHA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	2 ml Sérum
DHAS (dehydroepiandrosterone sulfate)	DHAS	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
DHAS enfant < 15 ans (dehydroepiandrosterone sulfate)	DHASE	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Diamine Oxydase (DAO)	DAO	Liq. amniotique	avant 9h	Liquide sur papier buvard	MEDECINE NUCLEAIRE TIMONE	Liquide amniotique (Timone 2 ^{ème} étage)
Di- hydhan (Phénytoïne)*	PHENI	1T vert/hépariné	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma
Diazepam Nordiazepam (valium)	DIAZ	Rouge/sans gel	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Dixon test voir coombs plaquettaire	DIKSO				E.F.S.	
Digitoxine*	DIGIT	Rouge/sec	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Digoxine*	DIGO	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Dihydroquinidine (Serecor)	DIHYQ	Rouge/sans gel	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
2-3 DiPhosphoGlycerate (2-3DPG)	23DPG	3T Vert/héparine	Réfrigéré	Sur RDV Descendre immédiatement au labo	Service Explorations Fonctionnelles Respiratoire Ste Marguerite	Prévenir chauffeur Transport réfrigéré Dans les 2 heures
Distomatose (sérologie Ac anti-douve)	DISTO	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Diurèse urine	D	urine 24 h	T°Ambiante		AUBAGNE	
Dosage pondéral des immunoglobulines (IgG, IgA, IgM)	IG	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Douve (Distomatose) (sérologie Ac anti-douve)	DISTO	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
2-3DPG (2-3 DiPhosphoGlycerate)	23DPG	3T Vert/héparine	Réfrigéré	Sur RDV Descendre immédiatement au labo	Service Explorations Fonctionnelles Respiratoire Ste Marguerite	Prévenir chauffeur Transport réfrigéré Dans les 2 heures
Drain (examen bactériologique)	PUS1	Pot stérile	T°Ambiante	Amener rapidement au labo. Noter heure de prélèvement, origine de prélèvement, renseignements cliniques et traitement antibiotique	AUBAGNE	
D Xylose	DXYLS	Marron/Gel	T°Ambiante	poids du patient + quantité d'xylose ingérée	CERBA	Sérum

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoires	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
EBV (Epstein Barr virus) sérologie	EBV	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
ECBU (Examen cyto bactériologique des urines)	CBU	Urines sur conservateur	T° Ambiante	Urines prélevées stérilement	AUBAGNE	
Echinococcose alvéolaire	ECHI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Echo Virus (sérologie)	ECHO	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Elastase fécale	ELA	Selles	T° Ambiante		CERBA	Selles
Electrophèse PAL	ISOPA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Electrophorèse de l'hémoglobine	HBELC	1T Violet/EDTA	T° Ambiante	joindre les résultats de la numération	CERBA	Sang total T° Ambiante
Electrophorèse LCR	ELEPL	LCR	T° Ambiante		CERBA	LCR
Electrophorèse protéines sang	ELEC	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Ajouter dosage protides
Electrophorèse protéines sang + Immunotypage sang	ELIF	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Ajouter dosage protides
Electrophorèse protéines urine	ELEU	Urines de 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	Ajouter dosage protides urinaires
Eleveurs oiseaux (précipitines aviaires) maladie du poumon	AVIA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
EMA (test) = recherche Shérocytose héréditaire par cytométrie flux	SHER	1 Violet/EDTA	T° Ambiante		HEMATO TIMONE	Sand total Température ambiante
Enolase neuro spécifique (NSE)	NSE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum Congelé
Enterovirus par PCR	ENTPC	LCR Selles, biopsies Ecouvillon en milieu transport Sang total EDTA	T° Ambiante		POC TIMONE pour LCR CERBA pour autres prélèvements	
Enzyme de conversion de angiotensine	ECA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Enzyme de conversion de l'angiotensine dans LBA	ECALB	LBA	T° Ambiante		CERBA	LBA Ccongelé
Epstein Barr Virus (sérologie)	EBV	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Epstein Barr Virus par PCR sang, LCR...	EBVPC	LCR Sang total EDTA	T° Ambiante		CERBA	
Equanil (méprobamate)	CARBA	Rouge/sec	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Erythropoïétine	ERYTH	1T Violet/EDTA	T° Ambiante		CERBA	Centrifuger immédiatement puis congeler le plasma
Escherichia Coli EntéroHémorragique EHEC Rech genes virulence VT1 et2	EHEC	Souche bactérienne Mc Conkey	T° Ambiante		CNR des E. coli	Adresse : voir secrétaires (étiquettes préimprimées)
Estradiol (oestradiol)	E2	Marron/Gel			LA CIOTAT	
Estriol E3 sérique	E3	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Estriol urinaire	E3U	urines de 24 h	T° Ambiante	noter diurèse	CERBA	20 ml urine + diurèse
Estrone E1 sérique	E1	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	3 ml sérum
Ethosuximide (Zaronin)	ETHOS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Examen bactériologique d'un cathéter	CATH	Pot stérile	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Renseigner origine de prélèvement. Noter si traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un escarre (recherche de BMR)	ESC1	2 Ecouvillon	T° Ambiante	Renseigner origine de prélèvement. Noter si traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un prélèvement oculaire	OP1 À OP3	2 Ecouvillon	T° Ambiante	Renseigner origine de prélèvement. Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un liquide Céphalo-Rachidien (Chimie+ cyto+bactério)	LCR	Pot stérile	Transport immédiat T° Ambiante	Noter heure et origine du prélèvement, renseignement clinique et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un liquide de ponction (biliaire, pleural, ascite, péricardique) (Chimie+ cyto+bactério)	PONC	Pot stérile	Transport rapide T° Ambiante	Noter heure et origine du prélèvement, renseignement clinique et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un prélèvement ORL	ORL1 À ORL5	2 Ecouvillons	T° Ambiante	Renseigner origine de prélèvement. Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un prélèvement ostéoarticulaire	OSTE	Pot stérile	Transport rapide T° Ambiante	Renseigner origine de prélèvement. Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	Créer COMP
Examen bactériologique de prélèvements périnataux (liq gastrique, placenta, ombilic...)	PEN1 à PEN6	2 Ecouvillons avec conservateur ou pot stérile	Transport rapide T° Ambiante	Renseigner origine de prélèvement. Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un prélèvement pulmonaire	EXP1 EXP2	Pot stérile	Transport rapide T° Ambiante	Renseigner origine de prélèvement.	AUBAGNE	

(expecto, aspiration, fibroscopie, LBA)	EXP3			Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique		
Examen bactériologique d'un prélèvement urétral	PUR	Ecouvillons avec conservateur	<u>Si pas sur conservateur à amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	A Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un prélèvement vaginal	PV	2 Ecouvillons avec conservateur	T° Ambiante	Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un pus profond (prélèvement d'une collection fermée sur pot stérile)	PUSF	Pot stérile	Transport rapide T° Ambiante	Renseigner origine de prélèvement. Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	Créer COMP
Examen bactériologique d'un pus superficiel (sur écouvillon ex : plaies, ulcères...)	PUS1	2 Ecouvillons avec conservateur	T° Ambiante	Noter heure de prélèvement, origine de prélèvement, renseignements cliniques et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Examen bactériologique d'un stérilet	STER	Pot stérile	Transport rapide T° Ambiante	Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	Créer COMP
Examen cyto bactériologique des urines (ECBU)	CBU	Urines sur conservateur	<u>Si pas sur conservateur à amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Urines prélevées stérilement. Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique Bon spécifique si urgences pédiatriques	AUBAGNE	

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
Facteur II (Prothrombine)*	II	1 T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 4 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	AUBAGNE	
Facteur V*	V	1 T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 4 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	AUBAGNE	
Facteur VII*	VII	1T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 4 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	AUBAGNE	
Facteur VIII (* possible)	FVIII	1T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	CERBA / HEMATO TIMONE SI URGENCE	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Facteur IX (* possible)	FIX	1 T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	CERBA / HEMATO TIMONE SI URGENCE	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Facteur X*	X	1 T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 4 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	AUBAGNE	
Facteur XI	FXI	1 T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	CERBA	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Facteur XII	FXII	1 T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	CERBA	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Facteur XIII	FXIII	1 T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	CERBA	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Facteur Willebrand (* possible)	FWIL	1 T Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Tube complètement rempli	CERBA / HEMATO TIMONE SI URGENCE	Centrifuger 15 min/ Décanter/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Facteur rhumatoïde (Latex-Waler-Rose)	RFC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Facteur rhumatoïde liquide de ponction	FRP	Liquide de ponction	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Farr (ac anti ADN natif)	FARR	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Felix et Widal (salmonelle, TAB)	TABC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Fer (sidérémie)*	FE	Jaune/Gel	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Ferritine	FERR	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Ferritine Erythrocytaire	FERRE	Vert/Héparine lithium	T° Ambiante	Numération à faire le même jour	CERBA	2 ml culot globulaire Centrifuger 10' - éliminer plasma - Laver 3 fois culot avec eau physiologique - Joindre résultats NF
Ferritine Glyquée	FERGL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Fibrine/fibrinogène*	FIB	Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 4 heures</u> T° Ambiante	Tube correctement rempli	AUBAGNE	
Fibromètre	FIBM	1 marron+1bleu +1 volet		Enregistrer et effectuer les analyses notées sur la fiches. Faire les envois correspondant à CERBA. Donner fiche à un biologiste	CERBA + AUBAGNE	
Fibronectine	FIBRO	1T violet/EDTA	T° Ambiante		CERBA	Centrifuger + congeler plasma
Fibrotect	FIBT	2T Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	4 ml sérum
Fièvre Familiale Méditerranéenne	FMF	2T Violet/EDTA	T° Ambiante	T° Ambiante	CERBA	Consentement ana génétique
Fièvre Q (Ac anti Coxiella Burnetti)	ACFQ	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Flecaine	FLECA	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Flucytosine (Ancotil) (5 FC))	ANCO	Rouge/sans gel	T° Ambiante	T30min en IV T2h en voie orale Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Fluoxetine (Prozac)	FLOXE	Rouge/sec	T° Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Fludex (Indapamide)	FLUD	Rouge/sec	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Flunitrazepam (Rohypnol)	FLUNI	Rouge/sec	T° Ambiante		PHARMACO	Sérum

Fluor	FLUOR	Marron/Gel	T° Ambiante	2 ml	TIMONE CERBA	Sérum
Folates globulaires	FOLAG	1T.Vert/hépariné	T° Ambiante		CERBA	Non centrifugé
Folates sériques (vitamine B9)	B9	Marron/Gel	A centrifuger rapidement T° Ambiante		LA CIOTAT	Non hémolysé
Fortum (Ceftazidime)	CEFTA	Marron/Gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Francisella sérologie (tularémie)	ACTUL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Frottis mono couche	FMC	Milieu spécial	T° Ambiante	Milieu spécifique fourni par CERBA	CERBA	
Fructosamine	FRUC	Violet/EDTA	T° Ambiante		CERBA	Plasma
FSH (+ test) folliculine stimuline hormone	FSH	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	
FSH urinaire	FSHU	Urines 24/heures	T° Ambiante		CERBA	

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
G6PD erythrocytaire	G6PD	TViolet/EDTA	T°Ambiante		CERBA	non centrifugé
Galactosidase alpha	AGALA	3TViolet/EDTA	T°Ambiante		CERBA	T°Ambiante
Galactosidase Béta	GALAC	ACD (à demander au labo)	T°Ambiante	Prélever le + près possible du passage du chauffeur	CERBA	
Gale (recherche)	ECTO	Prélèvement fait par biologiste			AUBAGNE	
Gammaglutamyl-transférases	GGT	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Gardéna (Phénobarbital)	PHENO	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Gastrine	GASTR	Marron/Gel	Chaîne du froid	examen à jeun	CERBA	Sérum congelé
Gazométrie/ Gaz du sang*	GAZO	Seringue héparinée	immédiatement au labo T°Ambiante	sang artériel 1 ml minimum	AUBAGNE	
Génotype alpha 1 antitrypsine	AATGE	2TViolet/EDTA	T°Ambiante		CERBA	non centrifugé réfrigérée
Gentalline au Pic (gentamycine)	GENPI	Jaune/Gel	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	AUBAGNE	Sérum
Gentalline Taux Résiduel (gentamycine)	GENTR	Jaune/Gel	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	AUBAGNE	Sérum
GH (Hormone de croissance)	GH	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé après entente préalable créer un dossier à part congelé
Glucagon	GLUCA	Rose/Aprotine	Chaîne du froid		CERBA	
Glucose urine(sucre)	GLYU	Echantillon ou 24 h	T°Ambiante	noter diurèse	AUBAGNE	
Glycémie (+ cycle)*	GLY	Jaune/Gel cycle : Gris/Fluorure Na	<u>Si tube jaune à amener dans les 2 heures</u> 3jours sur tube fluoré T°Ambiante	Patient à jeun strict	AUBAGNE	
Glycérol	GLYCE	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	2 ml sérum congelé
GOT/ASAT(transaminases)*	GO	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
GPT/ALAT (transaminases)*	GP	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Griffe du chat (sérologie bartonella)	GRCHA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Griffe du chat (Bartonella henselae) PCR sur biopsie, sang total, pus...	BARPC	Violet/EDTA si sang total	T°Ambiante		CERBA	Sang total
Grippe recherche antigène Grippe A et B*	RGRIP	Aspiration naso-pharyngée	Transport immédiat T°Ambiante	Si aspiration impossible, écouvillons spéciaux disponibles au labo	AUBAGNE	
Groupe rhéru EFS Phénotype rhéru Kell EFS AIR EFS	GRCTS PHKEC RAIR	2T violet/EDTA	T°Ambiante		EFS	non centrifugé
Groupe plaquettaire	GRPLA	Violet/EDTA	T°Ambiante	rendez-vous avec EFS avant prélèvement	EFS	non centrifugé

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
Halfan (halofantrine)	HALF	Rouge/sec	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE (le mercredi) AUBAGNE	5 ml sérum congelé
Haptoglobine	HAPTO	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
HCG sang (Beta HCG quantitatif)*	HCGD	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
HCG marqueur tumoral (sous unité bêta, chaîne libre)	HCGL	Marron/Gel	T°Ambiante	Centrifuger dans les 6 heures	CERBA	Sérum congelé
HCG marqueur tumoral global	HCG	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
HDL (cholestérol HDL)*	HDL	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Helicobacter pylori antigènes	HPAGC	Selles	T°Ambiante	Selles fraîches	CERBA	
Helicobacter Pylori Culture	HELPC	Biopsie gastrique	Abri lumière	Mettre immédiatement la biopsie dans le milieu de transport	CERBA	
Helicobacter pilori Test respiratoire	THPYL	Kit CERBA	T°Ambiante		CERBA	Nécessaire à prélèvement fourni par CERBA
Hématurie urine (sang)	HEMAU	échantillon	T°Ambiante		AUBAGNE	
Hémochromatose mutation C282Y	MC282	2 T. violets/EDTA	T°Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	Non centrifugé T°ambiante
Hémochromatose mutation H63D	MH63D	2 T. violets/EDTA	T°Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	Non centrifugé T°ambiante
Hémochromatose mutation C282Y	MC282	2 T. violets/EDTA	T°Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	Non centrifugé T°ambiante
Hémoculture	H	1 paire de flacon à hémoculture	Transport immédiat T°Ambiante	Pour pédiatrie un seul flacon spécial. Préciser si suspicion endocardite.	AUBAGNE	
Hémoculture BK	HEMBK	Vert Héparine	T°Ambiante		CERBA	sang
Hémoglobine A1C (glyquée)	HA1C	Violet/EDTA	T°Ambiante		AUBAGNE	
Hémoglobinémie	HBSER	Vert/Héparine	T°Ambiante	Le matin avant 9H	BIOCHIMIE STE MARGUERITE	Plasma
Hémoglobine (selles)	WEB	Selles	T°Ambiante		AUBAGNE	
Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)	HPNCF	2T EDTA	T°Ambiante		CERBA	Sang total
Héparine HBPM*	HBPM	Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures T°Ambiante</u>	tube complètement rempli noter traitement anticoagulant	AUBAGNE	
Héparine HBPM (ORGARAN)	HBPOR	Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures T°Ambiante</u>	tube complètement rempli noter traitement anticoagulant	HEMATO TIMONE	2 ml plasma rapide ou congelé noter TRT
Héparine standard*	HEP	Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures T°Ambiante</u>	tube complètement rempli noter traitement anticoagulant	AUBAGNE	
Hépatite A IgG	HAV	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	sérum
Hépatite A IgM	HAV	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	sérum
Hépatite B (Ag HBe)	AGBEC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	sérum
Hépatite B (Ac anti HBe)	ACBEC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	sérum
Hépatite B (ac anti HBC)	ACBC	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	sérum
Hépatite B (Ac anti HBC IgM)	HBCMC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Hépatite B (ac anti HBs)	ACBS	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	sérum
Hépatite B (Ag HBs)(* dans le cadre d'un AEV ou si statut sérologique inconnu lors de l'accouchement)	AGBS	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	sérum
Hépatite B (Ag HBs neutralisation)	AGBSN	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	sérum
Hépatite B PCR quantitative	VHBPC	2T EDTA/Violet	T°Ambiante	Décanter et congeler dans les 4h	CERBA	2 X 1,5 ml plasma congelé
Hépatite C (sérologie)	VHC	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	sérum
	VHCBD	2T EDTA/Violet	T°Ambiante	Décanter et congeler dans les 4h	CERBA	2 X 1,5 ml plasma congelé

Hépatite C charge virale quantitative						
Hépatite C charge virale qualitative	VHPCP	2T EDTA/Violet	T° Ambiante	Décanter et congeler dans les 4h	CERBA	2 X 1,5 ml plasma congelé
Hépatite C génotypage	VHCGE	2T EDTA/Violet	T° Ambiante	Décanter et congeler dans les 4h	CERBA	2 X 1,5 ml plasma congelé
Hépatite C (sérologie de contrôle)	VHCC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Noter la technique utilisée pour dépistage sérum
Hépatite D (delta) (ac anti hépatite D totaux)	ACHD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Hépatite D (delta) (ac anti hépatite D IgM)	IGMHD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	sérum
Hépatite D (delta) Antigène	AGHD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	sérum
Hépatite E (sérologie)	VHE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	sérum
Hépatite E (PCR)	VHEPC	Selles, sérum	T° Ambiante		VIROLOGIE TIMONE (Dr Ph Colson)	Selles, sérum
Herpes virus (HSV) (sérologie)	HERP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	sérum
Herpes virus (HSV) par PCR	HERPC	LCR, biopsie...	T° Ambiante		POC TIMONE	LCR (réfrigéré) biopsie
Herpes virus (HSV) culture	HERCU	milieu de transport	T° Ambiante		CERBA	Ecouvillon sur milieu de transport
Herpes virus (HSV) cytodagnostic	HERCY	lames	T° Ambiante		CERBA	lames
5HIA (ac hydroxy indole acétique)	5HIA	urines de 24h + 1% HCL	T° Ambiante	diurèse	CERBA	10 ml d'urine + diurèse
Histamine	HISTA	Violet/EDTA	T° Ambiante	Prélever dans les 10' après le choc Prélèvement non vacutainer Agitation douce	CERBA	Centrifuger au maximum 4 h après prélèvement 1500 T/mn 10 min +4°C Décantation immédiate puis congélation
Histamine urinaire	HISTU	Urines 24H	T° Ambiante	10 ml urines 24H CONGEELEES	CERBA	Urines congelées
Histamine libération	HIST1	3 T Violet/Edta	T° Ambiante Prélever le jour de l'envoi		CERBA	non centrifugés
Histoplasme recherche	HIST	LBA Aspiration ...			PARASITO TIMONE	
HIV (sérologie) (HIV 1+2)	HIV	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	sérum
HIV (sérologie) (dans le cadre d'un AEV)*	AEV	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	sérum
HIV sérologie de contrôle	HIVC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum. Noter les techniques utilisées pour le dépistage
HIV (antigène p24)	P24	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum (plasma possible)
HIV (charge virale) PCR quantitative	HIVBD	2T Violet/EDTA	T° Ambiante	Décanter et congeler dans les 4h	CERBA	Plasma EDTA congelé
HIV(ADN proviral)	VIADN	2T Violet/EDTA	T° Ambiante		CERBA	Sang total EDTA
HIV(Génotype de résistance aux anti rétroviraux)	GRAV	2T Violet/EDTA	T° Ambiante	Traitements en cours	CERBA	Plasma EDTA congelé Traitements en cours
HIV Western blot	WB12	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
HLA B27 génotypage	HLA27	2T Violet/EDTA	T° Ambiante	NE PAS METTRE AU FRIGO TEMP AMBIANTE fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	non centrifugés
HLA B*5701 génotypage	HLA57	2T Violet/EDTA	T° Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	non centrifugés
HLA classe II (DR, DQ)	HLADR	2T.Violet/EDTA	T° Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	non centrifugés
HLA Classe I (A, B, C)	HLAAB	2T.Violet/EDTA	T° Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	non centrifugés pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête
Homocystéine sérique	HOMO	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	1 ml sérum congelé rapidement
Hormone anti-mullerienne	AMH	Marron/Gel	T° Ambiante	3'bu 4°jour du cycle	CERBA	Sérum congelé
Hormone croissance (GH)	GH	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Hormone lactogène placentaire	HPL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	sérum
HPN (recherche de clone) cytométrie de flux	HPNCF	2T. Violet/EDTA	T° Ambiante		CERBA	non centrifugés
HTLV1/HTLV2	HTLV	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Hydatidose (sérologie)	HYDA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Hydroxylase acide	HYDAC	ACD (A demander au labo)	+4°C	Tubes ACD	CERBA	Sang Total
Hydroxyprolines	HYDRO	urines de 24h sur HCL	T° Ambiante	diurèse + poids + taille du patient	CERBA	10 ml urine + diurèse + poids + taille
17 Hydroxy corticostéroïdes (17OH)	17OH	urines de 24h	T° Ambiante	diurèse	CERBA	10 ml urine + diurèse
17 Hydroxy progestérone	17OHP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	> 2 ml sérum

(alpha hydroxy progestérone)						
18 Hydroxy corticostérone	18OHC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	sérum
18 Hydroxy cortisol	18HCU	urines de 24h	T° Ambiante	diurèse	CERBA	10 ml urine + diurèse
Hyperglycémie provoquée orale (maternité)	HPOMA	Jaune/Gel Ou gris/Fluorure Na	T° Ambiante	Glycémie à jeun puis à T60 et T120 après ingestion de 75g de glucose	AUBAGNE	

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
IgE CLA 30 mixtes	IGECM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
IgE CLA 30 pneumallergènes	IGECP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
IgE CLA 30 trophallergènes	IGECT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
IGE lacrymale	IGEL1 IGEL2	Larmes	T° Ambiante		CERBA	Larmes
IgE spécifique cellulaire Médicaments	IGEM1 IGEM2 IGEM3 IGEM4	3 Violet/EDTA	T° Ambiante	Prélèvement le jour de l'envoi pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	Non centrifugés
IgE spécifique cellulaire Test de libération de l'histamine : Venin d'hyménoptère	HIST1	3 violet/EDTA	T° Ambiante	Prélèvement le jour de l'envoi pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	Non centrifugés
IgE spécifique cellulaire Test de libération de l'histamine : Autres allergènes	HIST2 HIST3	3 Violet/EDTA	T° Ambiante	Prélèvement le jour de l'envoi pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	Non centrifugés
IgE spécifique anti progestérone	IGEPR	1 T ACD (A demander au labo)	T° Ambiante		CERBA	
IgE spécifiques pneumoallergènes Y compris venin d'hyménoptères	IGEP1 IGEP2 IGEP3 IGEP4 IGEP5 IGEP6	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum Max 5 allergènes
IgE spécifiques trophallergènes	IGET1 IGET2 IGET3 IGET4 IGET5 IGET6	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum Max 5 allergènes
IgE Phadiatop (mélange de pneumallergènes)	PHAD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
IgE Totales	IGEC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
IgE Trophatop (mélange de trophallergènes)	TROPH	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Maxi 3 mélanges de trophallergènes
IGF1 (somatomedine C)	SOMA	Marron/Gel	T° Ambiante	Sérum ou plasma hépariné	CERBA	Sérum congelé
IGFBP3	IGBP3	Marron/gel	T° Ambiante	Sérum ou plasma hépariné	CERBA	Sérum congelé
IgG, IgA, IgM (dosage pondéral des immuno globulines)	IG	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
IgG sous classe	SCIGG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
IgG4 spécifiques	IGG4	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Impipénème (Tienam)	TIEN	Rouge/sans gel	T° Ambiante	PIC IM 1 heure après – IV fin perf VALLEE avant injection Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Noter heure et mode administration
Imipramine (Tofranyl)	IMIP	Rouge/sec	T° Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Immuno électrophorèse urinaire	IEPU	Urines de 24 h sans ac borique	T° Ambiante	Noter Diurèse	CERBA	20 ml faire dosage PROUR
Immuno électrophorèse Sang ou Immunotypage	IT	Marron/Gel	T° Ambiante	Sérum	AUBAGNE	
Immuno électrophorèse sang	IF	Marron/Gel	T° Ambiante	Sérum	CERBA	Réfrigéré
Immuno fixation Urine Protéine de Bence Jones	IEPU	Urines de 24 h sans ac borique	T° Ambiante	Noter Diurèse	CERBA	20 ml Faire dosage PROUR
Immunofixation LCR	IEPPL	LCR	T° Ambiante	Noter la proteinorachie	CERBA	
Immunoglobulines D	IGD	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Immunoglobulines IgG, IgA, IgM (dosage pondéral des immuno globulines)	IG	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Imurel (6TGN métabolite)	6TG	2 Violet 4,5/EDTA	Réfrigéré	Prélèvement du lundi au mercredi	CERBA	Sang total réfrigéré
Immunophénotypage Lymphocytaire (sang ou moelle sur EDTA)	TYLYM	2 T violet/EDTA	T° Ambiante + NF	2 lames non fixées joindre NF et feuille renseignement Moelle : pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	Préciser sur bon si leucémie aiguë ou si syndrome lymphoprolifératif Rq : Feuille renseignement → voir biologiste
Immunophénotypage Lymphocytaire sur liq bio (ascite, LBA...)	TYLBA	Liq bio	T° Ambiante		HEMATO CONCEPTION	Liq bio
Incompatibilité foetomaternelle	IFOEM	1 T rouge/sec mère 1 T rouge/sec enfant	T° Ambiante		EFS	Non centrifugé
Indapamide (Fludex)	FLUD	Rouge/sec	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
INH (Isoniaside)	INH	2 T violets/EDTA	T° Ambiante	Poids du malade-dose de médicament ingérée-prélèvement 3 h après la prise du médicament	CERBA	Plasma congelé immédiatement

Inhibine B	INHIB	Marron/Gel	T° Ambiante	Prélever au 3 ^{ème} ou au 4 ^{ème} jour du cycle pour la femmes	CERBA	Sérum congelé
Inhibiteur C1 estérase Ag et Ac	C1IAC C1IAG	Marron/Gel	T° Ambiante	Sérum congelé	CERBA	Sérum congelé
Insuline (cycle + test)	INSUC	Violet/EDTA	T° Ambiante	Pas d'Hémolyse	CERBA	Congeler dans les 4 heures
Interféron Gamma	INTFG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Congeler
Iode Sérique	PBI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Iode Urinaire	IODEU	Urines de 24 h	T° Ambiante	Diurèse	CERBA	10 ml urine + diurèse
Ionogramme sang Na, K, Cl*	IONO	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Ionogramme urines Na, K*	IONOU	Echantillon ou 24 h	T° Ambiante	Noter Diurèse	AUBAGNE	centrifugation
ISAGA Toxoplasmose	ISAGA	Marron/Gel	T° Ambiante		PARASITO TIMONE	Sérum
Isoenzymes CPK (CPK isoenzymes)	CKMM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	1 ml sérum congelé
Isoniaside (INH)	INH	2 T violets/EDTA	T° Ambiante	Poids du malade-dose de médicament ingérée-prélèvement 3 h après la prise du médicament	CERBA	Plasma congelé immédiatement
Isospora belli	ISOSQ	Selles	T° Ambiante		CERBA	Selles
Itraconazole (Sporanox)	ITRA	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	1 ml de sérum minimum

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
JC Virus par PCR	JCVIR	LCR (tube stérile 3 ml)	à 4°	Tube stérile de 300 ml	CERBA	à 4°
Jack 2 (Mutation)	MUAJA	2 T EDTA Sang total	T° Ambiante	joindre NF et fiche de renseignements	CERBA	Non centrifugé
Kappa (dosage chaînes légères sérum)	KAPPA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Kappa (dosage des chaînes légères sur URINE de 24h)	KALAU	10 ml Urine de 24h	T° Ambiante	Urine de 24h	CERBA	Réfrigéré
KLEIHAUER (test)	KLEI	1T. Violet/EDTA	T° Ambiante		EFS	Non centrifugé
Keppra (Lévetiracetam)(dosage)	KEPP	Marron/Gel	T° Ambiante	Avant une nouvelle prise et toujours à la même heure	CERBA	Sérum

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
Lactate (acide lactique) *	LACT	Gris/ Fluorure Na	<u>A amener au labo dans les 15minutes Dans la glace</u>	Apporter immédiatement au laboratoire	AUBAGNE	
Lactogène placentaire hormone (hormone lactogène placentaire)	HPL	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Lambda (dosage chaînes légères sérum)	LAMBD	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Lambda (dosage des chaînes légères sur URINE DE 24h)	KALAU	10 ml Urine de 24h	T°Ambiante	Urine de 24h	CERBA	Réfrigéré
Laroxyl (amitriptyline)	AMITR	Rouge/sec	T°Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Latex-Waler-Rose (Facteur rhumatoïde)	RFC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	
LCR (Chimie+ cyto+bactério)	LCR	Pot stérile	T°Ambiante	Amener rapidement au labo. Noter heure et origine du prélèvement, renseignement clinique et traitement antibiotique	AUBAGNE	
LDH Lactico-Déshydrogénase*	LDH	Jaune/Gel	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T°Ambiante		AUBAGNE	
LDH isoenzymes	LDHIS	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	2 ml sérum
LDH liquide de ponction*	LDHP	Ponction	T°Ambiante		AUBAGNE	
LDL Cholestérol*	HDL	Jaune/Gel	T°Ambiante	Calculé. Saisir HDL	AUBAGNE	Sérum
LDL Oxydé	LDLOX	1TViolet/EDTA	T°Ambiante		CERBA	Plasma congelé
Legionnelle (Ag urinaire)	LEGIO	Urines	T°Ambiante		AUBAGNE	10 ml urines
Legionnelle (sérologie)	ACLE	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Leishmanies Recherche (moelle osseuse)	RLEIS	frottis		Etalement fait par biologiste	AUBAGNE	
Leishmanie par PCR dans moelle ou sang	LEIPC	1TViolet/EDTA	T°Ambiante		PARASITO TIMONE	Non centrifugé
Leponex (Clozapine)	CLOZA	Rouge/sans gel	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Leptine	LEPT	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Leptospirose sang (PCR)	LEPS	1TViolet/EDTA	T°Ambiante		CERBA	
Leptospirose urine	LEPU	urines concentrées du matin	T°Ambiante		CERBA	10 ml
Lévetiracetam (Keppra)(dosage)	KEPP	Marron/Gel	T°Ambiante	Avant une nouvelle prise et toujours à la même heure	CERBA	Sérum
Lexomyl (bromazépan)	BROMA	Rouge/sec	T°Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
LH Luthéine Hormone (+ cycle + test)	LH	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	
LH urinaire	LHU	Urines 24/heures	T°Ambiante		CERBA	
Licodaine (xylocaïne)	LIDO	Rouge/sans gel	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Lipase Liquide de drainage*	LIPLP				AUBAGNE	
Lipase Liquide gastrique*	LIPLG				AUBAGNE	
Lipase sang*	LIPA	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Lipase urine*	LIPAU	échantillon ou urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	
Lipurie	LIPU	Echantillon ou urines des 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	
Liquide Céphalo-Rachidien (Chimie+ cyto+bactério)	LCR	Pot stérile	Transport immédiat T°Ambiante	Amener rapidement au labo. Noter heure et origine du prélèvement, renseignement clinique et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Liquide de ponction (biliaire, pleural, ascite, péricardique) (Chimie+ cyto+bactério)	PONC	Pot stérile	T°Ambiante	Amener rapidement au labo. Noter heure et origine du prélèvement, renseignement clinique et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Listeria (sérologie)	ACLIS	Ne se fait plus. Rentrer le code et l'analyse s'annule automatiquement				
Lithium érythrocytaire	LIGL	1T Violet/EDTA	T°Ambiante		CERBA	Sang total t° ambiante
Lithium sérique*	LI	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
LP(a)	LPA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
LPA 1	LPA1	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Lyme (maladie de) par PCR	LYMPC	EDTA LCR ...	T°Ambiante	Plasma EDTA, LCR, Biopsie sur tube stérile sec à congeler	CERBA	Congeler biopsie
Lyme (maladie de) sérologie	ACLYM	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Lyme (maladie de) Western Blot	ACLYF	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Lymphocytes (immunophénotypage) (sang ou moelle sur EDTA)	TYLYM	2 T violet/EDTA	T°Ambiante + NF	2 lames non fixées joindre NF et feuille renseignement Moelle : pas de prélèvement samedi,	CERBA	Préciser sur bon si leucémie aiguë ou si syndrome lymphoprolifératif

				dimanche et veille de fête		
Lymphocytes T4T8 (T4T8)	T4T8	2T Violet/EDTA	T°Ambiante	Joindre NF prélever le jour de l'envoi	CERBA	Non centrifugé + NF pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête
Lymphoréticulose (griffe du chat) (sérologie)	GRCHA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Lymphoréticulose (Maladie griffes du chat) PCR sur biopsie, sang total, pus...	BARPC	Violet/EDTA si sang total	T°Ambiante		CERBA	Sang total
Lysozyme sérique	LYSO	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Lysozyme urinaire	LYSOU	urines de 24h	T°Ambiante		CERBA	10 ml urine

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
Macroamylase	AMYMA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Macroglobuline (Alpha 2)	A2MAC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Magnésium*	MG	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Magnésium érythrocytaire	MGERY	1TVert/Hépariné	T° Ambiante		CERBA	Non centrifugé
Magnésium urinaire	MGU	Urines de 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urines + diurèse
	TRYPA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	2 ml de sérum

| | | | | | | |

Maladie de CHAGAS ou Ac anti Trypanosome						
Maladie griffes du chat (serologie Bartonella henselae)	GRCHA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Maladie de Lyme (PCR)	LYMPC	EDTA LCR ...	T° Ambiante	Plasma EDTA LCR Biopsie sur tube sec à congeler	CERBA	Congeler biopsie
Maladie de Lyme (sérologie)	ACLYM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Maladie de Lyme (Western Blot)	ACLYF	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
MALTE (fièvre de) (sérologie Brucellose) (Wright ,Rose Bengale)	MALTC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
MCA	MCA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Méprobamate (Equanil)	CARBA	Rouge/sec	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Mercure urinaire	MERCU	Urines échantillon	T° Ambiante		CERBA	10 ml urines
Métanéphrines (urines)	METAN	urines de 24 h + 1ml HCl	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	15 ml urines
Métanéphrines plasmatiques	META	2 Violets/EDTA	T° Ambiante	Plasma congelé	CERBA	Plasma congelé
Méthémoglobine*	CARB	1 T vert hépariné	T° Ambiante		AUBAGNE	
Methylhistamine urinaire	METHY	20 ml Urines	T° Ambiante	Prélèvement 1 à 2 heures après le choc anaphylactique	CERBA	
Méthotrexate*	METHO	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Méthoxyamines (urines)	METAN	urines de 24 h + 1ml HCl	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	15 ml urines
Méthoxyamines plasmatiques	META	2 Violets/EDTA	T° Ambiante	Plasma congelé	CERBA	Plasma congelé
Microalbumine (urines)	MALB	échantillon urine ou urines 24h (préférable)	T° Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	
Microglobuline (Béta 2)(serum)	B2MI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Microglobuline (Béta 2) (Urines)	B2MIU	Urines des 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	5 ml minimum
Microsporidies recherche	MICRO	Selles	T° Ambiante		CERBA	
MNI Test Mononucléose infectieuse	EBV	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Analyse non effectuée Remplacée par EBV Sérologie Epstein Barr Virus
MODY recherche du gène	MODY	4 Violet/EDTA 1 Vert/héparinate	T° Ambiante	Remplir consentement	Fondation JEAN DAUSSET	
Mogadon (Nitrazépam)*	NITRO	Rouge/sec	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Monoxyde de carbone (oxyde de carbone carboxyhémoglobine)*	CARB	1T vert hépariné	T° Ambiante		AUBAGNE	
Mucolysaccharides urinaires	MUCOU	Urines de 24 h	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	50 ml urines congelée + diurèse
Mutation C677T MTHFR	MTHFR	2T violet/EDTA	T° Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	Non centrifugé T° ambiante
Mutation Hémochromatose C282Y	MC282	4 T. violets/EDTA	T° Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	Non centrifugé T° ambiante
Mutation Hémochromatose H63D	MH63D	4 T. violets/EDTA	T° Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	Non centrifugé T° ambiante
Mutation Hémochromatose C282Y	MC282	4 T. violets/EDTA	T° Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	Non centrifugé T° ambiante
Mutation du Facteur V LEIDEN	GENFV	1T violet/EDTA	T° Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	Non centrifugé T° ambiante
Mutation du gène de la prothrombine (facteur II)	GENF2	1T violet/EDTA	T° Ambiante	fiche de renseignements cliniques + consentement	CERBA	Non centrifugé T° ambiante
Mutation gène récepteur LDL	MULDL	7T violet/EDTA	T° Ambiante	Prélever Lundi mardi mercredi Fiche consentement + renseignement	Bio Mol HOP ST-ANTOINE	
Mutation en APOB 100	MUAPO	7T violet/EDTA	T° Ambiante	Prélever Lundi mardi mercredi Remplir consentement	Bio Mol HOP ST-ANTOINE	
Mutation Jack 2	MUAJA	2 T EDTA Sang total	T° Ambiante	joindre NF et fiche de renseignements	CERBA	Non centrifugé
Mycobactéries (culture)	BK	Crachats ou urines ou autres	T° Ambiante	Indiquer l'origine du prélèvement Pour les urines, les	LA CIOTAT	

				prélèvement doivent être faits 3 jours de suite sur la totalité des urines du matin, si possible avec restriction hydrique		
Mycobactéries hémoculture ou moelle	HEMBK	Vert Héparine	T° Ambiante		CERBA	sang
Mycobactérie Antibiogramme	BKATB	Culture BK	T° Ambiante		LA CIOTAT	
Mycobactérie Autres	BKIDA	Culture BK	T° Ambiante		LA CIOTAT	
Mycobactérie Identification	BKIDT	Culture BK	T° Ambiante		LA CIOTAT	
Mycobactéries recherche par PCR	BKPCR	Crachats ou urines ou autres	T° Ambiante	Indiquer l'origine du prélèvement	CERBA	
Mycologie (prélèvement pour culture)	MYCOL	Prélèvement cutané ou autre	Si patient transportable, l'amener au labo. Sinon prendre contact avec un biologiste		AUBAGNE	
Mycoplasmes génitaux (culture)	MYCOP	1 Ecouvillon Bouchon ROSE ou Urines	T° Ambiante		AUBAGNE	1 seul Ecouvillon Bouchon ROSE pour faire PV + mycoplasmes
Mycoplasmes génitaux sérologie	MYCG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
	MYCP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum

Mycoplasma Pneumoniae (sérologie)						
Mycoplasme dans LBA Recherche par culture	RMYCO	Prélev respiratoires	T° Ambiante	Milieux transport pour culture 1 vol pour 10 vol	CERBA	Prélèv respiratoires
Mycoplasme dans prélèvement respiratoire Recherche par PCR	MYCPC	Prélèv Respiratoires	T° Ambiante	Envoyer directement prélèvement respiratoire	AUBAGNE	Prélèv respiratoires
Myélogramme	MYELO	Lames	T° Ambiante	Prélèvement par Medecin	AUBAGNE	Etallement par Biologiste
Myoglobine	MYO	Jaune/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	
Myoglobine urinaire	MYOUC	Urines	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T° Ambiante	Urines <u>fraîches</u>	CERBA	
Mysoline (primidone)	PRIMI	Rouge/sec	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
NASH Test	NASHT	2T Marron/Gel	T° Ambiante	Noter age, sexe, poids, taille	CERBA	Sérum
Nebcine (tobramycine)*	TOBD	1 T vert hépariné	T° Ambiante	T0 T fin de perf Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
NEFA (ac gras non estérifiés)	NEFA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Néitromycine (néitilmycine)	NETIL	1 T vert hépariné	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Néitilmycine (néitromycine)	NETIL	1 T vert hépariné	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Neuro Spécifique Enolase NSE	NSE	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Nitro Bleu test	NBT	1T Violet/EDTA + 3 gouttes héparine pure	T° Ambiante	Prendre rendez-vous tube avant 9h au labo	HEMATO TIMONE	Non centrifugé
Nitrazépam (Mogadon)	NITRO	Rouge/sec	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Norvir (Ritonavir)	RITO	1 T vert hépariné	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma hépariné
NSE (Neuro Spécifique Enolase)	NSE	Marron/Gel	T° Ambiante	A descendre au labo dans l'heure suivant le prélèvement	CERBA	Sérum congelé
NTX marqueur osseux (urines)	NTX	Seconde urine du matin	T° Ambiante		CERBA	10 ml
Nucléotidase 5'	5NUC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Numération Formule sanguine*	NF	Violet/EDTA	T° Ambiante		AUBAGNE	
Numération sanguine*	NG	Violet/EDTA	T° Ambiante		AUBAGNE	

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
17 OH (17 hydroxycorticostéroïdes)	17OH	urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urines+ Diurèse
18 OH corticostérone	18OHC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	sérum
18 OH cortisol	18HCU	urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urine + diurèse
Oestradiol (estradiol)	E2	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	
Opiacés urine*	DROGU	échantillon urine	T°Ambiante		AUBAGNE	
Orosomucoïde (AAG)	AAGC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	
Osmolalité sanguine	OSMO	Jaune/gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Calcul
Osmolarité sanguine	OSMO	Jaune/gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Calcul
Osmolalité urinaire*	OSMOU	urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	Calcul
Osmolarité urinaire*	OSMOU	urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	Calcul
Ostéocalcine	OSTEO	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Oxalurie	OXUCE	urines de 24h recueillies sur HCL	T°Ambiante		CERBA	10 ml urines pH 2 Bien mélanger les urines avant d'aliquoter
Oxazépam (Séresta)	OXAZ	Rouge/sec	T°Ambiante		PHARMACO TIMONE	
18 Oxocortisol	18XCU	urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urine + Diurèse
Oxyde de carbone*	CARB	1T vert hépariné	T°Ambiante		AUBAGNE	Non centrifugé
Oxyures (recherche œufs/ Scotch-test)	SCOT	Prélèvement par biologiste		Contacteur un biologiste	AUBAGNE	

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
P50	P50	3 Vert/heparine	Réfrigéré	Sur RDV Descendre immédiatement au labo	Service Explorations Fonctionnelles Respiratoire Ste Marguerite AUBAGNE	Prévenir chauffeur Transport réfrigéré Dans les 2 heures
Paludisme (recherche plasmodium)*	PALU	Violet/EDTA	T°Ambiante		AUBAGNE	2 lames
Paludisme Recherche antigène*	QBC	Violet/EDTA	T°Ambiante		AUBAGNE	Sang total
Papillomavirus génitaux (HPV oncogènes)	PAPGE	Milieu de transport	T°Ambiante	Hybridation	CERBA	Réfrigéré
Paracétamol*	PARAC	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Parasitologie des selles	PAS	Selles	Examen direct stable 4h T°Ambiante		AUBAGNE	
Parathormone (PTH)	PTH	Marron/Gel	T°Ambiante	A jeun le matin	CERBA	Sérum
Parvovirus B19 (sérologie) voir Ac anti Parvovirus B19	ACPA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	2 ml sérum minimum
Parvovirus PCR	PARVO	4 Violet/EDTA	T°Ambiante	Rapidement labo	CERBA	5ml plasma réfrigéré
PBI proteine binding iodure	PBI	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
PCR tout germe	PCRTG	Prélèvement bacterio (Liq articulaire, liquide de ponction...)	T°Ambiante		MICROBIO TIMONE	
Penthotal (thiopental)	THIP	Rouge/sans gel	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Peptide C	PEPC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Peptide C urinaire	PEPCU	urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	5 ml urines congelées + 5 ml urines non congelées
Perls (coloration)	PER	Frottis moelle	T°Ambiante		LABO HEMATO HOPITAL NORD	2 lames
PH urine*	PHU	Echantillon ou 24h	T°Ambiante		AUBAGNE	
Phadiatop (IgE melange de pneumallergènes)	PHAD	Marron/gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Phénobarbital (Gardenal)*	PHENO	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Phénolstéroïdes	PHENU	urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	25 ml urines + diurèse
Phénotype érythrocytaire *	PHER1 PHER2	1 T Bleu/Citrate	T°Ambiante		EFS	Non centrifugé
Phénotype rhésus kell*	PHKEC	Violet/EDTA	T°Ambiante		EFS	Non centrifugé
Phénytoïne (Di- hydant)*	PHENI	1T Vert/hépariné	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma
Philadelphie (Chromosome) BCR/ABL Réarrangement (Diagnostic LMC)	BCRFI	2 violets/EDTA	T°Ambiante	Méthode FISH	FACULTE HOPITAL NORD	Sang total T°Ambiante
Philadelphie (Chromosome) BCR/ABL Transcrit (Maladie résiduelle – Suivi de traitement)	BCRPC	2 violets/EDTA	T°Ambiante	Méthode RTPCR	FACULTE HOPITAL NORD	Sang total T°Ambiante
Phosphatase alcaline *	PAL	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Phosphatase alcaline osseuse	PALO	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Phosphaturie*	PU	Urines de 24h	T°Ambiante	Noter la diurèse	AUBAGNE	Acidifier les urines
Phosphore*	P	Jaune/Gel	<u>A amener au labo dans les 2 heures</u> T°Ambiante		AUBAGNE	
Phosphore taux de réabsortion*	RTP	Urines 24h Jaune/Gel	T°Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	Acidifier les urines
Pigments biliaires urinaires	PIGU	Echantillon ou 24h	T°Ambiante		AUBAGNE	
Plaquettes*	PLAQ	Violet/EDTA	T°Ambiante		AUBAGNE	
Plaquettes sur tube citraté * (contrôle thrombopénie)	PLAQC	1T Bleu/Citraté	T°Ambiante		AUBAGNE	
Plasminogène	PLASM	1T Bleu/Citraté	T°Ambiante		CERBA	Plasma congelé Double centrifugation
Plombémie	PLOMB	1TVert/Hépariné	T°Ambiante	si enfant remplir fiche de surveillance de saturnisme infantile	CERBA	Non centrifugé
Plomburie	PLOMU	urines du matin	T°Ambiante		CERBA	10 ml urines
Pneumocoque : antigène Urinaire*	PNEU	Urines	T°Ambiante		AUBAGNE	10 ml urines
Pneumocoque : antigène LCR*	PNEUL	LCR	T°Ambiante		AUBAGNE	
Pneumocystis carinii/LBA	PCYSL	LBA	T°Ambiante		CERBA	
Polyomavirus (JC Virus) par PCR	JCVIR	LCR (tube stérile 3 ml)		Tube stérile de 300 ml	CERBA	+ 4€
Polypeptide Pancréatique	POPA	Maron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Ponction (liquide de) Chimie+ cyto+bactério	PONC	Pot stérile	Transport rapide T°Ambiante	Noter heure et origine du prélèvement, renseignement clinique et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Porphyries plasmatiques	PORPS	2TViolet/EDTA	T°Ambiante A l'abri de la lumière	Remplir Fiche de renseignement	CENTRE FRANÇAIS DES PORPHYRIES	Non centrifugé. T° ambiante à l'abri de la lumière
Porphyries dans les selles	PORPF	Selles après 3j de régime sans	T°Ambiante A l'abri de la lumière	Remplir Fiche de renseignement	CENTRE FRANÇAIS DES	A l'abri de la lumière

		viande saignante			PORPHYRIES	
Porphyrines urinaires	PORPU	Urines du matin 50 à 100 ml	T°Ambiante A l'abri de la lumière	Remplir Fiche de renseignement	CENTRE FRANÇAIS DES PORPHYRIES	à l'abri de la lumière
Potassium	K	Jaune/gel	<u>A amener au labo dans les 2 heures T°Ambiante</u>		AUBAGNE	
Potassium intra érythrocytaire	KGR	1Tvert/Hépariné	Sang Total		CERBA	Sang total
Poumon d'éleveurs oiseaux (Précipitines aviaires)	AVIA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Poumon de fermier	POUMF	Maron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Pouvoir bactéricide du sérum	PBS	Maron/Gel	T°Ambiante		LABO BACTERIO AIX	-envoi souche bactérienne -envoi sérum
PRADAXA (nouveau anticoagulant oral)	PRADA	Citraté/BLEU	T°Ambiante	ICI le Bon de demande TLF055	MORANGE TIMONE	
Préalbumine*	PREAL	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Précipitines (café vert)	CAFEV	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Précipitines aviaires (éleveurs oiseaux)	AVIA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Prégnandiol	PREGU	Urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urine
Prégnérolone (sulfate de)	PREGS	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Prélèvement pulmonaire (bactério) (expecto, aspiration, fibroscopie, LBA)	EXP1 EXP2 EXP3	Pot stérile	T°Ambiante	Amener rapidement au labo. Renseigner origine de prélèvement. Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Prélèvement urétral (bactério)	PUR	Ecouvillons	T°Ambiante	Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Prélèvement vaginal (bactério)	PV	1 Ecouvillon Bouchon ROSE	T°Ambiante	Noter heure de prélèvement et traitement antibiotique	AUBAGNE	1 seul Ecouvillon Bouchon ROSE
Primidone (mysoline)	PRIMI	Rouge/sec	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Procalcitonine*	PCT	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
Progestérone	PROGE	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Prograf (Tacrolimus)	TACRO	1TViolet/EDTA	T°Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sang total
Prolactine (+ cycle + test)	PROL	Marron/Gel	T°Ambiante	Prélever après 20 min de repos	LA CIOTAT	
Prolactine BIG-BIG ou Macro	PROLM	Marron/Gel	congelé	Le matin à jeun Prélever après 20 min de repos	CERBA	2 ml sérum congelé
Protéine 14-3-3 sur LCR Recherche du gène PRNP (si demandé) (Maladie de Creutzfeldt Jacob)	CJ	LCR (3-4 ml) Sang EDTA 10ml Tube sec 10 ml	<u>5 ml LCR non hémolysé Tube sang non centrifugé</u>	Rapide +4°C avec pack réfrigérant	Laboratoire de Biochimie Hopital Lariboisière PARIS par CERBA	
Protéine C	PC	Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures T°Ambiante</u>	Tube complètement rempli	CERBA	Centrifuger 15 min/ Décantier/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Protéine C Réactive (CRP)*	CRP	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Protéine de Bence Jones (immuno fixation urinaire)	IEPU	Urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	CERBA	Doser PROUR
Protéine S	PS	Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures T°Ambiante</u>	Tube complètement rempli	CERBA	Centrifuger 15 min/ Décantier/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Protéine S activité	PSACT	Bleu/Citraté	<u>A amener au labo dans les 2 heures T°Ambiante</u>	Tube complètement rempli	CERBA	Centrifuger 15 min/ Décantier/ Recentrifuger 15 min puis aliquoter 2 fois 1ml plasma puis congeler
Protéinurie*	PROUR	Urines de 24h	T°Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	
Protides sang*	PT	Jaune/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Proto porphyries sanguines	PROPO	2TViolet/EDTA	T°Ambiante	A l'abri de la lumière	CENTRE FRANÇAIS DES PORPHYRIES	Ne pas centrifuger
Prozac (Fluoxétine)	FLOXE	Rouge/sec	T°Ambiante		PHARMACO TIMONE	
PSA (antigène spécifique prostatique)	PSA	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	Double centrifugation, à congeler le jour même
PSA libre (rapport PSA libre / PSA total)	PSAL	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	
Psittacose ornithose	PSIT	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
PTH (Parathormone)	PTH	Violet/EDTA	T°Ambiante	A jeun le matin	CERBA	Plasma
PTH related peptide	PTHPR	Rose/Aprotinine	dans la glace	Tube disponible au laboratoire	CERBA	Plasma congelé
Pus superficiel (sur écouvillon ex : plaies, ulcères...)	PUS1	2 Ecouvillons avec conservateur	T°Ambiante	Noter heure de prélèvement, origine de prélèvement,	AUBAGNE	

				renseignements cliniques et traitement antibiotique		
PV (Prélèvement vaginal)	PV	2 Ecouvillons avec conservateur	T°Ambiante	Noter heure de prélèvement, origine de prélèvement renseignements cliniques et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Pyridinoline (déoxypyridinolines urinaires)	PYRI	Secondes urines du matin	T°Ambiante		CERBA	10 ml d'urines sans acide
Pyruvate kinase érythrocytaire	PK	1TViolet/EDTA	T°Ambiante		CERBA	Non centrifugé

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
Quantiféron	QUANT	Tubes spéciaux	Voir protocole de prélèvement spécifique	Demander au labo protocole	CERBA	Protocole spécial
Quinine, quinidine	QUINI	Rouge/sans gel	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	
RAI (AIR, agglutinines irrégulières)	AIR	1 violet/EDTA	T°Ambiante		EFS	
Rapamycine (Rapamune-Sirolimus)	SIRO	1 Violet/EDTA	T°Ambiante	Taux résiduel à jeun avant prise	PHARMACO TIMONE	
Rapport protéines créatinine	RPC	Echantillon d'urines	T°Ambiante	Le calcul se fait dans le SIL	AUBAGNE	Echantillon d'urines
Récepteur Soluble TRF	RETRF	Marron/Gel	T°Ambiante	T°Ambiante	CERBA	T°Ambiante
Recherche de plasmodium (paludisme)*	PALU	Violet/EDTA	T°Ambiante	Renseignements cliniques (lieu séjour, chimioprophylaxie)	AUBAGNE	4 lames
Redon (examen bactériologique)	PUS1	Pot stérile	T°Ambiante	Amener rapidement au labo. Noter heure de prélèvement, origine de prélèvement, renseignements cliniques et traitement antibiotique	AUBAGNE	
Rénine	RENI	2 Violet/EDTA	Chaîne du froid		CERBA	Plasma Congelé
Réserve alcaline, R.A, (CO2 total)*	CO2	Jaune/Gel ou seringue héparinée	T°Ambiante		AUBAGNE	
Résistance aux antirétroviraux	GRAV	2T Violet/EDTA	T°Ambiante	Fournir dernier résultat de charge virale + historique traitement	CERBA	Plasma EDTA congelé
Résistance à la protéine C activée (RPCA)	RPCA	1Bleu/Citraté	T°Ambiante	Tube correctement rempli	CERBA	Double centrifugation Plasma congelé rapidement
Résistance chloroquine	RCHL	2 Bleu/citrate 1 Vert/héparine T edta de départ	T°Ambiante	Acheminer rapidement au laboratoire	Laboratoire Parasitologie Hôpital LAVERAN	Faire partir rapidement
Réticulocytes*	RETI	Violet/EDTA	T°Ambiante		AUBAGNE	
Rétinol (vitamine A1)	VITA	1 T vert/Hépariné Ou Marron/Gel	T°Ambiante à l'abri de la lumière		CERBA	Plasma ou serum congelé à l'abri de la lumière
Rétinol binding globulin	RBP	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Revataz (Atazanavir)	ATAZA	1T vert hépariné	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma hépariné
Reverse T3	RT3	Maron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Rhésus fœtal sur sang maternel	RHFOE	1 EDTA 10 ml 1 EDTA 5 ml 1 Marron/Gel cf kit prélèvement	T°Ambiante (<25°C)	Remplir la Consentement/reenseignements Rh foetal + duplicata groupe	Laboratoire Biologie Moléculaire Hôpital Nord	Envoi via EFS
Rickettsiose (sérologie)	ACRIC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Rifampicine	RIFA	Rouge/sec	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Ritonavir (Norvir)	RITO	1 T vert hépariné	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma hépariné
Rivotril (clonazépam)*	CLONA	Rouge/sec	T°Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Rohypnol (flunitrazépam)*	FLUNI	Rouge/sec	T°Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Rotavirus*	ROTA	Selles	<u>A amener au labo dans les 6 heures</u> T°Ambiante		AUBAGNE	
Rougeole (sérologie IgG+M)	ROUG	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Rougeole (sérologie IgM)	ROUM	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
RPCA (Résistance à la protéine C activée)	RPCA	1Bleu/Citraté	T°Ambiante	Tube correctement rempli	CERBA	Double centrifugation Plasma congelé rapidement
Rubéole (sérologie IgG)	RUB	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Rubéole (sérologie IgM)	RUBM	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
Salicylés*	SAL	T Vert/Hépariné	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma transport<3h
Salmonellose (sérologie) (TAB, Widal et Félix)	TABC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Salmonelle (typage)	TYSAL	Souche bactérienne			AUBAGNE	
Sang (hématurie)*	HEMAU	Ech.ou 24h	T° Ambiante		AUBAGNE	
Sang (selles)	WEB	Selles	T° Ambiante		AUBAGNE	
Saquinavir	SAQUI	T Vert/Hépariné	T° ambiante	T0 ou T3h Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Départ 9h
Sarcoptes scabiei	ECTO	Prélèvement fait par biologiste			AUBAGNE	
SBHG	SBHG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Sex Binding Hormon	SCC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
SCC squamous scell carcinoma	SCHIR	1 Violet/EDTA	T° Ambiante	Fait par biologiste	AUBAGNE	
Schizocytes (recherche)(*si urgence)	TPMAD	Jaune+Bleu	T°Ambiante	Analyse calcul avec TP et BIL	AUBAGNE	
Score de MADDRAY	SCOT	lames			AUBAGNE	
Scotch-test (recherché œufs oxyures)	DIHYQ	Marron/gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Serecor (Hydroquinidine)	OXAZ	Rouge/sec	T° Ambiante		TOXICO SALVAROR	Sérum
Séresta (oxazépam)	SEROT	1Vert/Hépariné Lithium	T° Ambiante		CERBA	Sang total congelé
Sézary (recherche cellule)	SEZAR	Frottis sanguins ou 1 Violet EDTA	T° Ambiante	Frottis sanguin au bout du doigt ou 1 tube violet	AUBAGNE	
Sphérocytose héréditaire (recherche par cytométrie flux) =test EMA	SPHER	1 Violet/EDTA	T° Ambiante		HEMATO TIMONE	Sang total Température ambiante
Sirolimus(Rapamycine Rapamune)	SIRO	1 Violet/EDTA	T° Ambiante	Taux résiduel à jeun avant prise	PHARMACO TIMONE	
Somatomédine C (IGF1)	SOMA	Marron/Gel	T° Ambiante	Sérum ou plasma hépariné	CERBA	Sérum congelé
Soumission chimique	SOUM	EDTA/Fluorure	T° Ambiante	Cheveux+urines+sang total Cf classeur gris biologiste	PHARMACO TIMONE	
Sous classe IgG	SCIGG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Sous unité alpha libre de la FSH.HCG.LH.TSH	SUA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Sporanox (Itraconazole)	ITRA	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	1 ml de sérum minimum
Stéatorrhée	STEA	Selles		Selles sur 3 pots et 3 jours	CERBA	10 g
Sucre (glucose urines)*	GLYU	Ech. ou 24h	T° Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	
Syndrome X fragile	XFRAG	3x5ml violet EDTA	T° Ambiante	pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête Joindre une fiche de renseignements cliniques et consentement	CERBA	Sang total
Syphilis(VDRL + TPHA)	BW	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Syphilis IgM	FTAM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Syphilis confirmation Western-Blot IgG ou IgM	WBSY	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Syphilis LCR-VDRL+TPHA	BWL	LCR/Echantillon	T° Ambiante		AUBAGNE	LCR

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
6TGN (métabolite Imurel)	6TGN	2 Violet 4,5/EDTA	Réfrigéré	Prélèvement du lundi au mercredi	CERBA	Sang total réfrigéré
	T3L	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	

| | | | | | | |

| | | | | | | |

T3 libre						
T4 libre	T4L	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
T4T8 (Lymphocytes T4T8)	T4T8	2 T violet/EDTA	T° Ambiante	Demander NF Le matin du lundi au vendredi	CERBA	Non centrifugés + NF T° AMBIANTE
TAB (salmonellose, Widal et Félix)	TABC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Tacrolimus FK506 Prograf	TACRO	violet/EDTA	T° Ambiante		CERBA	Sang total
Targocid (Teicoplanine)	TEICO	Rouge/sans gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Taux de réabsorption du Phosphore	RTP	Urines de 24h+ 1 tube Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
TCA (Temps de Céphaline Activé)*	TCAK	Bleu/citraté	<u>A amener au labo dans les 4 heures</u> T° Ambiante	Tube correctement rempli	AUBAGNE	
Tégrétol (Carbamazépine)*	TEGRE	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Teicoplanine (Targocid)	TEICO	Rouge/sans gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Temps de saignement (méthode IVY)	TSIVY			Prendre rendez-vous laboratoire	AUBAGNE	
Tenofovir (Viread)	TENO	1 T vert hépariné	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma hépariné
Test à la sueur	SUE			Prendre rendez-vous laboratoire	AUBAGNE	
Testostérone biodisponible	TESTB	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Testostérone Femme/Enfant	TESTF	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	2 ml de sérum
Testostérone Homme	TESTH	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	1 ml de sérum
Testostérone libre	TESTL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Théophylline*	THEOD	1 T vert hépariné	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Thiopental (Pentotal)	THIP	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Thyrocalcitonine (calcitonine)	TCT	Marron/Gel	Chaîne du froid		CERBA	Congelé
Thyroglobuline	THYRG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Thyroxin Binding Globulin	TBG	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Tienam (Impipenem)	TIEN	Rouge/sans gel	T° Ambiante	PIC IM 1 heure après – IV fin perf VALLEE avant injection Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Noter heure et mode administration
Tobramycine (Nebcine)	TOBD	1 T vert hépariné	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
TIH (Ac anti Héparine - Ac anti- PF4)*	ACPF4	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Tofranyl (Imipramine)	IMIP	Rouge/sec	T° Ambiante		PHARMACO TIMONE	Sérum
Topiramate (epitomax) (dosage)	TOPI	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé
Toxine botulinique recherche	TOXBO	3 T Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	5 ml sérum
Toxiques urine*	TOXU	Urine échantillon	T° Ambiante		AUBAGNE	Si urine trouble, centrifuger
Toxocarose (sérologie)	TCAN	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Toxoplasmose (sérologie) IgG, IgM	TOXO1	Marron/Gel	T° Ambiante	Si nouveau-né préciser nom de la mère	LA CIOTAT	
Toxoplasmose (sérologies) IgA seules	TOXOA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Toxoplasmose (sero tech ISAGA)	ISAGA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Toxoplasmose avidité des IgG	TOXAC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Toxoplasmose LCR (PCR)	TOXLD	LCR Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	LCR + Sérum
Toxoplasmose dans LBA (PCR)	TOXLB	LBA	T° Ambiante		CERBA	LBA
Toxoplasmose dans placenta (PCR)	TOXPL	Placenta+sérum de la mère+sang du cordon	T° Ambiante		Labo Parasito Faculté Médecine Marseille	Placenta + sérum de la mère + sang du cordon
Toxoplasmose liquide amniotique par PCR	TOXLP	Tube sec stérile	T° Ambiante	Tube sec stérile 2 x 5 ml	CERBA	2 X 5 ml liquide amniotique
Toxoplasmose (profil comparé par Western-Blot)	WBTOX	Sérum mère+ sérum bébé	T° Ambiante		LABO PARASITO TIMONE	
TP (Temps de Quick-taux de prothrombine)*	TQ	Bleu/citraté	<u>A amener au labo dans les 4 heures</u> T° Ambiante	Tube correctement rempli	AUBAGNE	
TP patient sous AVK = TP INR*	TPAVK	Bleu/citraté	<u>A amener au labo dans les 4 heures</u> T° Ambiante	Tube correctement rempli Noter traitement anticoagulant	AUBAGNE	
TPA (Tissu Polypeptide Antigène)	TPA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
TPHA (BW)	BW	Marron/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Transaminases (GOT, GPT)*	GO/GP => G2	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Transcétolase	TRANS	2 T vert/héparinés	T° Ambiante		CERBA	Centrifuger-isoler les GR- les congeler-envoyer GR congelés
Transferrine*	TRF	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	Sérum
Transferrine carboxy déficiente	CDT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum congelé

Tranxène (clorzébate)	CLORA	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Trichinellose (sérologie)	TRIC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Triglycérides*	TG	Jaune/Gel	T° Ambiante	Patient à jeun strict Résultats abaissés en cas d'administration de N Acétylcystéine et de Méfamizole	AUBAGNE	
Trisomie 21 (Dépistage combiné au 1 ^{er} trimestre)	TRI1T	1T sec sans gel	T° Ambiante	Remplir fiche consentement / renseignements trisomie 21	CERBA	1ml sérum centrifuger rapidement
Trisomie 21 (Dépistage séquentiel intégré au 2d semestre)	TRI2T	1T sec sans gel	T° Ambiante	Remplir fiche consentement / renseignements trisomie 21	CERBA	1ml sérum centrifuger rapidement
Trisomie 21 (Marqueurs sériques maternels 2 ^{ème} trimestre)	TRISO	1T sec sans gel	T° Ambiante	Remplir fiche consentement / renseignements trisomie 21	CERBA	1ml sérum centrifuger rapidement
Trisomie 21 (test génétique non invasif)	T21	Tubes spéciaux fournis	T° Ambiante	Remplir fiche consentement	CERBA	
Trophallergènes CLADHS	IGECT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Tubes non centrifugés
Trophatop (IgE mélange de trophallergènes)	TROPH	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Maxi 3 mélanges de trophallergènes
Troponine*	TROPO	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Trypsinémie sanguine	TRYP	Marron/Gel	Chaîne du froid	Dans la glace	CERBA	Sérum congelé
Tryptase	TRYPT	Marron/Gel	Descendre rapidement au laboratoire	Prélèvement dans l'heure qui suit le choc anaphylactique	CERBA	Sérum congelé
TSH ultrasensible Tyréostimuline hormone (+ cycle + test)	TSH	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Tularémie (sérologie)	ACTUL	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Typage Lymphocytaire (sang ou moelle sur EDTA)	TYLYM	2 T violet/EDTA	T° Ambiante + NF	2 lames non fixées joindre NF et feuille renseignement hématologie moelle : pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	Préciser sur bon si leucémie aiguë ou si syndrome lymphoprolifératif
Typage Lymphocytaire liq bio (ascite, LBA...)	TYLBA	Liq biologique	T° Ambiante		HEMATO CONCEPTION	
Urbanyl (Clobazam Norclobazam)	CLOB	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Urée sang*	URE	Jaune/Gel	T° Ambiante		AUBAGNE	
Urée urine*	UREU	Echantillon ou 24h	T° Ambiante	Noter diurèse	AUBAGNE	
Uricémie (acide urique)*	URI	Jaune/Gel	T° Ambiante	Noter traitement uricolytique Résultats abaissés en cas d'administration de Méfamizole	AUBAGNE	

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observation laboratoire
Valium (Diazépam-Nordiazépam)	DIAZ	Rouge/sans gel	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Vancomycine*	VANC	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
Varicelle/Zona (sérologie) IgG+ IgM	ACVA	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Varicelle/Zona (sérologie) IgM	ACVAM	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Varicelle/Zona par PCR LCR	VZVPC	LCR	T°Ambiante		CERBA	réfrigéré
Varicelle/Zona culture virale	VZVCU	Ecouvillon sur milieu de transport	T°Ambiante		CERBA	
Vasopressine (ADH)	ADH	3T. Violet/EDTA	Chaîne du froid	Dans la glace	CERBA	4 ml plasma congelé
VCA IgM (EBV VCA IgM) (sérologie EBV)	EBV	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum
VDRL (BW) (sérologie syphilis)	BW	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
VIH (VIH1 + VIH2) (sérologie)	HIV	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	
VIH (VIH1 + VIH2) (dans le cadre d'un AEV) *	AEV	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	
VIH sérologie de contrôle	HIVC	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum. Noter les techniques utilisées pour le dépistage
VIH (antigène p24)	P24	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum (plasma possible)
VIH (charge virale) PCR quantitative	HIVBD	2T Violet/EDTA	T°Ambiante	Décanter et congeler dans les 4h	CERBA	Plasma EDTA congelé
VIH (ADN proviral)	VIADN	2T Violet/EDTA	T°Ambiante		CERBA	Sang total EDTA
VIH (Génotype de résistance aux anti rétroviraux)	GRAV	2T Violet/EDTA	T°Ambiante	Fournir dernier résultat de charge virale + historique traitement	CERBA	Plasma EDTA congelé
VIH Western blot	WB12	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
VIP (Vaso active intestinal peptide)	VIP	Rose/Aprotinine	Chaîne du froid	Dans la glace	CERBA	1 ml de plasma congelé
Viread (Tenofovir)	TENO	1 T vert hépariné	T°Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Plasma hépariné
	CMV	Marron/Gel	T°Ambiante		AUBAGNE	Sérum

Virus CMV (Cytomégalovirus) sérologie						
Virus CMV par PCR	CMVPC	Violet/EDTA LCR	T°Ambiante	Préciser la nature du prélèvement sur le bon	CERBA	Sang total T°Ambiante
Virus CMV Antigène leucocytaire	CMVAG	Vert/Hépariné	T°Ambiante	Transport dans les 24h	CERBA	Sang total
Virus CMV Avidité des IGG	CMVAV	Marron/Gel	T°Ambiante		CERBA	Sérum
Virus CMV culture cellulaire (urine sans conservateur, LBA, biopsie, ponction)	RCMV	Echantillon urine pot stérile sans conservateur	T°Ambiante	Milieu de transport virus	CERBA	
Virus CMV sang	VIRE	Vert/Hépariné Lithium	T°Ambiante	pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête	CERBA	5 ml
Virus (culture virale non orientée)	CULVI	Tout prélèvement sur milieu de transport	T° Ambiante		CERBA	
Virus JC par PCR	JCVIR	LCR (tube stérile 3 ml)		Tube stérile de 3 ml	CERBA	+ 4°C
Virus respiratoire syncytial (VRS) (sérologie)	VRS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Virus respiratoire syncytial (VRS) recherche directe	VRSB	Liquide de lavage nasal	T° Ambiante		AUBAGNE	
Virus West Nile virus PCR sang	WNVIR	Hépariné vert ou EDTA	T° Ambiante	Fiche de renseignements	IRBA-IMTSSA (LAVERAN)	Conservation et transport à +4°
Virus West-Nile virus LCR	WNPL	LCR	T° Ambiante	Fiche de renseignements	IRBA-IMTSSA (LAVERAN)	Conservation et transport à +4°
Virus West-Nile virus sérologie igG	ACWN	Marron/Gel	T° Ambiante	Fiche de renseignements	IRBA-IMTSSA (LAVERAN)	Conservation et transport à +4°
Vitamine A1 (Rétinol)	VITA	1T.Vert/Hépariné Ou Marron/Gel	à l'abri de la lumière T° Ambiante		CERBA	Plasma ou serum congelé à l'abri de la lumière.
Vitamine B1	VITB1	1T.Violet/EDTA	T°Ambiante à l'abri de la lumière	Sang Total	CERBA	Sang Total congelé à l'abri de la lumière
Vitamine B12 (B12)	B12	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	sérum non hémolyse
Vitamine B6	VITB6	Marron/Gel	T° Ambiante	Prélèvement avant 250mg de pyridoxine per os et 24h après	CERBA	2 ml de sérum congelé
Vitamine B9(Folates)	B9	Marron/Gel	T°Ambiante		LA CIOTAT	Sérum non hémolyse
Vitamine C	VITC	1T vert/Hépariné	T°Ambiante à l'abri de la lumière	1 ml de vaseline puis centrifugation < 30 mn	CERBA	Plasma congelé
Vitamine D (25 OH)	VITD	Marron/Gel	T° Ambiante		LA CIOTAT	Sérum
Vitamine D3 (1,25OH)	VITD3	Marron/Gel	Chaîne du froid	Dans la glace	CERBA	2 ml sérum congelé
Vitamine E (alpha tocophérol)	VITE	1T vert/Hépariné	T°Ambiante à l'abri de la lumière		CERBA	Plasma congelé à l'abri de la lumière
Vitamine K	VITK	2T Verts/Héparinés	T° Ambiante à l'abri de la lumière		CERBA	4 ml plasma congelé à l'abri de la lumière
Vitamine PP ou B3	VITPP	1T Vert/Hépariné	T°Ambiante à l'abri de la lumière		CERBA	Non centrifugé. Congelé à l'abri de la lumière
Vitesse de sédimentation (VS)*	VS	Noir/Citraté	T° Ambiante	Rempli complètement , étiquette sur entretoise et non sur le tube	AUBAGNE	
VRS recherche directe*	VRSB	Liquide de lavage nasal	Transport immédiat T° Ambiante		AUBAGNE	
VRS (Virus respiratoire syncytial) (sérologie)	VRS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
VZV par PCR LCR	VZVPC	LCR	T° Ambiante		CERBA	réfrigéré
VZV culture virale	VZVCU	Ecouvillon sur milieu de transport	T° Ambiante		CERBA	
VZV (sérologie) IgG+ IgM	ACVA	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
VZV (sérologie) IgM	ACVAM	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
Waler-Rose - Latex (Facteur rhumatoïde)	RFC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	
Western-Blot Toxoplasmose	WBTOX	Sérum mère+ sérum bébé	T° Ambiante		LABO PARASITO TIMONE	
Western blot HIV 1+2	WB12	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
West Nile virus culture sang	WNVIR	Hépariné vert ou EDTA	T° Ambiante	Fiche de renseignements	IRBA-IMTSSA (LAVERAN)	Conservation et transport à +4°
West-Nile virus LCR	WNPL	LCR	T° Ambiante	Fiche de renseignements	IRBA-IMTSSA (LAVERAN)	Conservation et transport à +4°
West-Nile virus sérologie IgG	ACWN	Marron/Gel	T° Ambiante	Fiche de renseignements	IRBA-IMTSSA (LAVERAN)	Conservation et transport à +4°
Widal et Félix (sérologie salmonelle, TAB)	TABC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Wright (sérologie brucellose, malte, rose bengale)	MALTC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Xanthine	XANT	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Xanthine urinaire	XANTU	Urines de 24 h	T° Ambiante	Diurèse	CERBA	10 ml urines + diurèse
X fragile (Syndrome)	XFRAG	3x5ml violet EDTA	T° Ambiante	pas de prélèvement samedi, dimanche et veille de fête Joindre une fiche de renseignements cliniques et consentement	CERBA	Sang total
XARELTO (nouvel anticoagulant oral)	XARELTO	Citraté/BLEU	T° Ambiante	ICI le Bon de demande TLF055	MORANGE TIMONE	
Xylocaïne (lidocaïne)	LIDO	Rouge/sans gel	T° Ambiante	Fiche de renseignement à compléter	PHARMACO TIMONE	Sérum
Yersinia (sérologie)	YERS	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
Zarontin (ethosuximide)	ETHOS	Marron/Gel	T° Ambiante	Prélèvement avant une nouvelle prise et toujours à la même heure	CERBA	Sérum
Zika sérologie	ACZIK	Marron/Gel	T° Ambiante	A effectuer 5 jours après le début des signes cliniques	CERBA	Sérum
Zika par PCR sang	ZIKPC	violet EDTA	T° Ambiante	A effectuer dans les 7 jours suivant le début des signes cliniques	CERBA	1ml plasma EDTA congelé
Zika par PCR urines	ZIUPC	échantillon urine	T° Ambiante	A effectuer dans les 10 jours suivant le début des signes cliniques	CERBA	5ml urines congelées
Zinc	ZINC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7

ANALYSES	MEMO	TYPE DE TUBE	Condition Transport Services-Laboratoire	OBSERVATIONS	LABO	Observations Laboratoire
11βOH androstènedione	11BAN	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
11 Désoxycorticostéroïdes urines	11DCO	échantillon urine	T° Ambiante		CERBA	10 ml urine
11 Désoxycortisol sérique	11DES	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	2 ml sérum
11 Désoxycortisol urines	11DSU	urines de 24 h	T° Ambiante		CERBA	10 ml urine
17 Alpha hydroxyprogestérone	17OHP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
17 CETO	17CET	Urines des 24h	T° Ambiante	Noter la diurèse	CERBA	20 ml
17 Hydroxy corticostéroïdes (17OH)	17OH	urines de 24h	T° Ambiante	diurèse	CERBA	10 ml urine + diurèse
17 Hydroxy progestérone (alpha hydroxy progestérone)	17OHP	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	> 2 ml sérum
18 Hydroxy corticostérone	18OHC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	sérum
18 Hydroxy cortisol	18HCU	urines de 24h	T° Ambiante	diurèse	CERBA	10 ml urine + diurèse
18 Oxocortisol	18XCU	urines de 24h	T° Ambiante	Noter diurèse	CERBA	10 ml urine + Diurèse
2-3DPG (2-3 DiPhosphoGlycerate)	23DPG					L'examen ne s'effectue plus
21 Désoxycortisol sérique	21DES	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	2 ml sérum
5HIA (ac hydroxy indole acétique)	5HIA	urines de 24h + 1% HCL	T° Ambiante	diurèse	CERBA	10 ml d'urine + diurèse
5 Nucléotidase	5NUC	Marron/Gel	T° Ambiante		CERBA	Sérum
6TGN (Imurel métabolite)	6TG	2 Violet 4,5/EDTA	Réfrigéré	Prélèvement du lundi au mercredi	CERBA	Sang total réfrigéré

* : analyse effectuée ou expédiée 24h/24 7j/7